

Gebrauchsanweisung

Kühl-/Gefrierschrank

MED-Reihe PRO-ACTIVE / ULTIMATE



 **Kirsch**
Member of the Hettich Group.

Vor Beginn aller Arbeiten Gebrauchsanweisung lesen!

Philipp KIRSCH GmbH

Im Lossenfeld 14

77731 Willstätt-Sand

DEUTSCHLAND

Telefon: +49 781 9227-0

Telefax: +49 781 9227-200

E-Mail: info@KIRSCH-medical.de

Internet: www.KIRSCH-medical.de

D1003_05_25_Gebrauchsanweisung_MED_Version_4.2_de_DE

Über diese Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung wurde für das Produkt "Kühl-/Gefrierschrank" (im Folgenden „Gerät“) erstellt.

Personen, die mit dem Gerät umgehen, müssen diese Gebrauchsanweisung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.

Darüber hinaus gelten gegebenenfalls spezielle Betreiberpflichten.

Aufbewahrungspflicht

Diese Gebrauchsanweisung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden.

Zielgruppen

Diese Gebrauchsanweisung dient der Information folgender Zielgruppen:

- Betreiber des Geräts
- Anwender des Geräts

Für den technischen Kundendienst (im Folgenden „Service“) steht eine gesonderte Serviceanleitung für das Gerät zur Verfügung.

Modelle

Diese Anleitung ist für folgende Geräte gültig:

Modell	Fabriknummer ab
MED 100 PRO-ACTIVE	100 30 35000
MED 126 PRO-ACTIVE	125 33 25000
MED 200 PRO-ACTIVE	200 30 35000
MED 288 PRO-ACTIVE	280 30 35000
MED 340 PRO-ACTIVE	330 30 35000
MED 468 PRO-ACTIVE	460 30 35000
MED 520 PRO-ACTIVE	500 31 35000
MED 520 CR PRO-ACTIVE	500 43 35000
MED 720 PRO-ACTIVE	700 39 35000
FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 01 25309 / 095 30 26036
MED 288 ULTIMATE	280 71 35000
MED 340 ULTIMATE	340 71 35000
MED 468 ULTIMATE	460 71 35000
MED 520 ULTIMATE	500 71 35000
MED 720 ULTIMATE	700 71 35000

Modell	Fabriknummer ab
MED 520 CR-HF PRO-ACTIVE	500 46 25000
MED 720 CR-HF PRO-ACTIVE	700 41 25000

Abbildungen

Abbildungen in dieser Gebrauchsanweisung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

Herstelleradresse

Hersteller	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-0
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

Geschäftszeiten:

- Mo. bis Do.: 08:00 bis 12:15 Uhr, 13:15 bis 16:30 Uhr
- Fr.: 08:00 bis 12:00 Uhr, 13:00 bis 16:00 Uhr

Servicekontakt

Service	Philipp Kirsch GmbH
Adresse	Im Lossenfeld 14
	77731 Willstätt-Sand
	DEUTSCHLAND
Telefon	+49 781 9227-777
Telefax	+49 781 9227-200
E-Mail	info@kirsch-medical.de
Internet	www.kirsch-medical.de

Auftragsannahme zu den Geschäftszeiten.

Weitere Informationen

Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu dieser Gebrauchsanweisung oder zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten regionalen Fachhändler oder direkt an KIRSCH.

Inhaltsverzeichnis

1	Produktbeschreibung	7
1.1	Geräteübersicht.....	7
1.2	Anzeige- und Bedienelemente.....	8
1.2.1	Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit.....	8
1.2.2	Funktion des Schlüsselschalters	8
1.2.3	Funktion der Tasten und Anzeigen.....	9
1.3	Lieferumfang.....	10
1.4	Schnittstellen.....	11
1.5	Gerätfunktionen.....	12
1.5.1	Kühlung.....	12
1.5.2	Superfrost-Funktion.....	13
1.5.3	Abtauung.....	13
1.5.4	Temperaturanzeige.....	13
1.5.5	Temperaturspeicher.....	13
1.5.6	Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK.....	14
1.5.7	Temperaturfühler.....	14
1.5.8	Akku.....	15
1.6	Zusätzliche Gerätekomponenten.....	15
1.6.1	Temperaturdokumentation.....	16
1.6.2	Innenbeleuchtung.....	19
1.6.3	Abschließbare Glastür.....	19
1.6.4	Reinraum-Kit.....	19
2	Zubehör	21
2.1	KIRSCH EVOLUTION CLOUD.....	21
2.1.1	Kommunikation.....	21
2.1.2	Datenspeicherung.....	21
3	Sicherheit	23
3.1	Symbole in dieser Gebrauchsanweisung.....	23
3.2	Zweckbestimmung.....	24
3.3	Vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	24
3.4	Restrisiken.....	25
3.5	Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit.....	27
3.6	Sicherheitskennzeichnungen.....	29
3.7	Personalqualifikation.....	30
3.8	Persönliche Schutzausrüstung.....	31
4	Transport und Stilllegung	33
4.1	Gerät transportieren.....	33
4.2	Gerät stilllegen.....	34
4.3	Gerät wieder in Betrieb nehmen.....	34
5	Aufbau, Einbau und Anschluss	36
5.1	Gerät aufstellen.....	36
5.2	Gerät einbauen.....	36

5.3	Gerät anschließen.....	37
6	Inbetriebnahme.....	39
6.1	Tätigkeiten bei Inbetriebnahme.....	39
6.2	Gerät programmieren.....	39
6.2.1	Solltemperatur.....	40
6.2.1.1	Funktion der Solltemperatur.....	40
6.2.1.2	Solltemperatur anzeigen und ändern.....	40
6.2.2	Temperaturwarngrenzen.....	42
6.2.2.1	Funktion der Temperaturwarngrenzen.....	42
6.2.2.2	Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern....	43
6.2.3	Luftfeuchte einstellen.....	44
7	Bedienung.....	46
7.1	Gerät einschalten.....	46
7.2	Gerät ausschalten.....	46
7.3	Temperaturspeicher abrufen/löschen.....	47
7.4	Superfrost-Funktion einschalten.....	47
7.5	Datenauslesung am Gerät mit PC-KIT-STICK.....	48
7.6	PC-KIT-NET einrichten (optional).....	51
7.7	Gerät beschicken.....	55
8	Reinigung und Desinfektion.....	58
9	Wartung.....	61
9.1	Sicherheitstechnische Kontrolle.....	61
9.2	Akku auswechseln.....	63
9.3	HEPA-Filter auswechseln.....	64
10	Alarmer.....	66
10.1	Alarmfunktionen.....	66
10.2	Umgang mit Alarmen.....	67
11	Statusanzeigen und Fehlermeldungen.....	69
11.1	Statusanzeigen.....	69
11.2	Fehlermeldungen.....	69
12	Außerbetriebnahme und Entsorgung.....	75
12.1	Gerät außer Betrieb nehmen.....	75
12.2	Gerät entsorgen.....	75
13	Anhang.....	77
13.1	Konformitätserklärung.....	78
13.2	Technische Daten.....	79
13.3	Einbauzeichnung.....	82
14	Index.....	85

1 Produktbeschreibung

1.1 Geräteübersicht

Modell MED (Beispiel) MED 520
PRO-ACTIVE



- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit ↪ Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 8
- 3 Türschloss
- 4 Umluftkühlung
- 5 Stelleisten
- 6 Türabdrücker
- 7 Rollschubführung + Korpussschienen
- 8 Rollen
- 9 Schubfach

1.2 Anzeige- und Bedienelemente

1.2.1 Aufbau der Anzeige- und Bedieneinheit

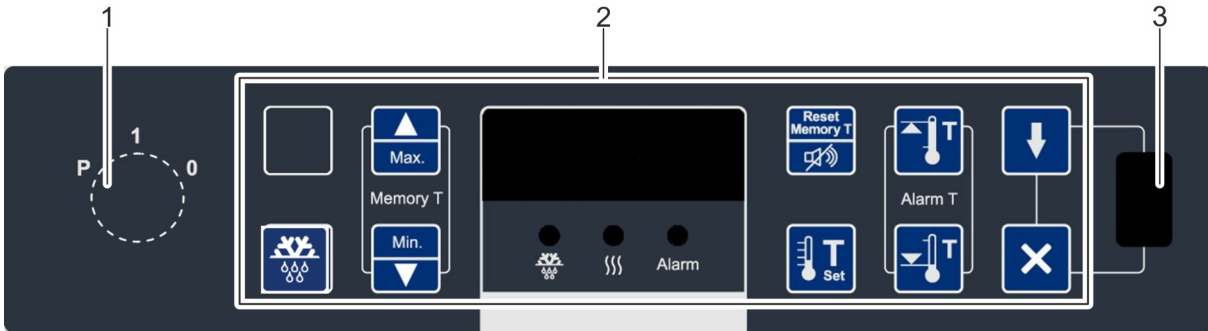


Abb. 1: Anzeige- und Bedieneinheit

- 1 Schlüsselschalter
- 2 Anzeige- und Bedieneinheit (Tastenbelegung variabel)
- 3 USB-Port

1.2.2 Funktion des Schlüsselschalters

Tab. 1: Positionen des Schlüsselschalters

Schlüsselstellung	Position	Funktion	Beschreibung
	„0“	Gerät ausschalten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät ausschalten (beispielsweise, um einen Neustart durchzuführen). ■ Das Display zeigt FFF. ■ Um das Gerät komplett stromlos zu schalten, Netzstecker ziehen.
	„1“	Gerät einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät betreiben. ■ Gerätewerte anzeigen und zurücksetzen (beispielsweise IST-Temperatur oder Temperaturgrenzen). ■ Alarme quittieren.
	„P“	Gerät programmieren.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät einstellen (beispielsweise Sollwerte oder Temperaturwarngrenzen). ■ Parameterlisten anzeigen lassen. ■ Alarme quittieren.
















Gerät stets in Schlüsselposition „1“ betreiben, um Manipulationen zu vermeiden. Schlüssel während des normalen Betriebs abziehen und sicher verwahren.


1.2.3 Funktion der Tasten und Anzeigen

Die Funktion der Tasten und Anzeigen der folgenden Übersicht entnehmen:

Tab. 2: Tasten

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Max.]	Maximalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Min.]	Minimalwert des Temperaturspeichers anzeigen.
	[Reset]	Reset des Temperaturspeichers durchführen. Summer ausschalten.
	[Temperaturwarnung max.]	Obere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Temperaturwarnung min.]	Untere Temperaturwarngrenze abfragen.
	[Solltemperatur]	Solltemperatur abfragen.
	[Abtauung]	Zusätzliche Abtauung aktivieren.
	[Zusatzlicht/Zusatzabtauung]	Kombinationstaste: Zusätzliche Abtauung aktivieren. Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Superfrost]	Superfrost-Funktion aktivieren.
	[Luftfeuchte]	Luftfeuchte einstellen.
	[Licht]	Innenbeleuchtung dauerhaft an-/ausschalten.
	[Start]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK starten.
	[Abbruch]	Datenauslesung über einen PC-KIT-STICK abbrechen.


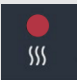
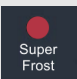
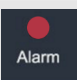
Lieferumfang

Taste	Bezeichnung	Funktion
	[Leertaste]	Leertaste ohne Funktion.



Bestimmte Tasten haben je nach Ausführung eine Mehrfachfunktion in Verbindung mit anderen Tasten.

Tab. 3: Anzeigen

Anzeige	Bezeichnung	Funktion
	„Abtauung“	Abtauung ist aktiv.
	„Luftfeuchte“	Luftfeuchte ist aktiv (Temperaturkonstanz verbessert, Luftfeuchte hoch).
	„Superfrost“	SuperFrost ist aktiv.
	„Alarm“	Ein Alarm wurde ausgelöst.

1.3 Lieferumfang

Innenausstattung

Folgende für den Betrieb zugelassene Innenausstattung wird für jedes Gerät gemäß Gerätespezifikationen mitgeliefert:

- Drahtrost
- Schubfächer

Abschließbare Gerätetür

Das Gerät verfügt über eine abschließbare Gerätetür.

Mitgelieferte Schlüssel

Abhängig von den Gerätekomponenten werden folgende Schlüssel mitgeliefert:

PRO-ACTIVE

- Geräteschlüssel
- Türschlüssel (für abschließbare Gerätetür)

ULTIMATE

- 2 x RFID-Transponder (für abschließbare Gerätetür)

Software

Die Software KIRSCH-DATANET steht ausschließlich als Download unter <https://kirsch-medical.de/service/downloads/kirsch-datanet-software> zur Verfügung.

 *Bitte beachten Sie zur Installation/Konfiguration die zur Software zugehörige Gebrauchsanweisung. Diese finden Sie in der Installationsroutine.*


1.4 Schnittstellen

Das Gerät verfügt über folgende Schnittstellen, um weitere Geräte (im Folgenden „Module“) zur Temperaturüberwachung und Temperaturdokumentation anzuschließen:

Tab. 4: Schnittstellen

Schnittstelle	Modul
LAN-Schnittstelle	PRO-ACTIVE <ul style="list-style-type: none"> ■ PC-KIT-NET (optional) ULTIMATE <ul style="list-style-type: none"> ■ PC-KIT-NET integriert
USB-Port	PRO-ACTIVE <ul style="list-style-type: none"> ■ PC-KIT-STICK ULTIMATE <ul style="list-style-type: none"> ■ Serviceschnittstelle
Potentialfreier Alarmkontakt	Fernwarnanlage (beispielsweise Kirsch Evolution Cloud Modul oder Anschluss Gebäudeleittechnik (GLT) (Schaltbild am Gerät beachten)

Informationen zum Anschließen der Module an das Gerät der jeweiligen Produktdokumentation entnehmen.

 **Nur kompatible USB-Sticks anschließen!**
Am USB-Port ausschließlich Module mit diesen Eigenschaften anschließen:

- Speicherkapazität von höchstens 32 GB
- Formatierung mit dem FAT-32-Format



USB-Stick nach Gebrauch abziehen!

Der USB-Stick darf nicht dauerhaft im Gerät stecken.

- USB-Stick nach dem Ende der Datenübertragung abziehen ☞ „Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK“ auf Seite 74.

1.5 Gerätefunktionen

1.5.1 Kühlung

Kältemaschine

Das Gerät verfügt über eine Kältemaschine mit innenliegendem Verdampfer zur Kühlung des Kühlguts.

Nach Erstinbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme benötigt die Kältemaschine einige Zeit, um den Innenraum auf den eingestellten Temperatursollwert herabzukühlen.

Umluftkühlung



Bei der Umluftkühlung zirkuliert die Luft im Innenraum des Kühlschranks. Die Umluftkühlung erfolgt durch Luftleitbleche und ein Gebläse.

Die Umluftkühlung reduziert physikalisch bedingte Temperaturunterschiede und die Solltemperatur wird im gesamten Innenraum konstant gehalten.

Die Umluftkühlung ist auf Dauerbetrieb eingestellt und wird beim Öffnen der Tür automatisch abgeschaltet.

Verflüssiger



Über den Verflüssiger (Kondensator) wird die anfallende Wärmeenergie an die Umgebungsluft abgegeben.



Der Verflüssiger ist je nach Modell entweder an der Rückwand, unten oder oben im Maschinenraum angebracht.

Abb. 2: Verflüssiger (Beispiel)

1.5.2 Superfrost-Funktion



Das Gerät verfügt über eine Superfrost-Funktion.

Mit der Superfrost-Funktion kann das Gerät schnellstmöglich auf die tiefstmögliche Temperatur heruntergekühlt werden ↪ *Kapitel 7.4 „Superfrost-Funktion einschalten“ auf Seite 47.*

1.5.3 Abtauung

Automatische Abtauung



Das Gerät tauet alle 12 Stunden automatisch ab. Die automatische Abtauung erfolgt mit zeitlicher und thermischer Überwachung. Bei der automatischen Abtauung ist die Einhaltung des Temperatursollwerts des Geräts gewährleistet.



Wenn der Abtauvorgang aktiv ist, leuchtet die LED-Anzeige „Abtauung“ im Display.

Zusätzliche Abtauung

Zusätzlich zur automatischen Abtauung kann der Abtauvorgang manuell gestartet werden.



➔ Taste *[Zusatzabtauung]* 4 Sekunden drücken.

⇒ Der Abtauvorgang startet.

1.5.4 Temperaturanzeige



Abb. 3: Display

Die Temperaturanzeige befindet sich auf dem Display der Anzeige- und Bedieneinheit des Geräts ↪ *Kapitel 1.2 „Anzeige- und Bedienelemente“ auf Seite 8.*

Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.



Die Temperaturanzeige zeigt nicht die aktuelle Lufttemperatur des Innenraums an.

Die Alarmfunktion und die Temperaturwarngrenzen orientieren sich an der im Display angezeigten Temperatur des Kühlguts.

1.5.5 Temperaturspeicher




Der Temperaturspeicher zeichnet während des Betriebs den jeweils erreichten maximalen und minimalen Temperaturwert auf.

Der Temperaturspeicher beginnt mit der Aufzeichnung nach dem Erreichen der Solltemperatur oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb.

Der Temperaturspeicher wird nach Neustart oder Reset des Geräts automatisch zurückgesetzt.

Der Temperaturspeicher kann manuell abgerufen und gelöscht werden [↪ Kapitel 7.3 „Temperaturspeicher abrufen/löschen“ auf Seite 47.](#)

1.5.6 Temperaturüberwachung mit PC-KIT-STICK

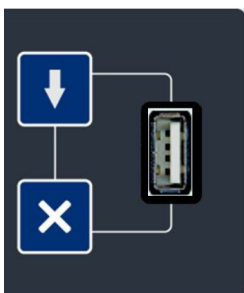

Der Temperaturspeicher des Geräts dokumentiert den maximalen und minimalen Temperaturwert.

PC-KIT-STICK ist die einfachste Möglichkeit der automatischen Temperaturdokumentation.

Bei dem internen Speicher handelt es sich um einen Ringspeicher. Die Daten werden bis zu 90 Tage gespeichert, bevor die ältesten Datensätze überschrieben werden. Wir empfehlen daher eine Auslesung der Daten in einem regelmäßigen Intervall, z.B. wöchentlich oder monatlich, um Lücken in der Aufzeichnung zu vermeiden.

Die Datenübertragung erfolgt über USB-Stick. Auch während des Auslesens von Daten wird die Temperatur permanent dokumentiert. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten eingebunden werden [↪ „Schnittstellen“ auf Seite 11.](#)

Zur dauerhaften Temperaturüberwachung kann das Gerät mit einer Temperaturdokumentation über Netzwerk ausgestattet werden [↪ Kapitel 1.6.1 „Temperaturdokumentation“ auf Seite 16.](#)

1.5.7 Temperaturfühler

Das Gerät ist mit mehreren Temperaturfühlern ausgestattet.

Die Funktion des jeweiligen Temperaturfühlers der folgenden Tabelle entnehmen:

Farbe	Bezeichnung	Funktion
	Verdampferfühler (rot)	Steuert die Abtauphase
	Regelfühler (braun)	Steuert die Überwachungseinheit
	Regelfühler (violett)	Steuert die Überwachungseinheit

1.5.8 Akku

Funktion Akku

Der Akku versorgt bei Stromausfall die Temperaturüberwachung für bis zu 30 Stunden.

Die Temperaturüberwachung sorgt dafür, dass der Temperaturverlauf gespeichert und bei Bedarf der Temperaturalarm ausgelöst wird.

Der Akku lädt sich im Normalbetrieb auf und wird über eine Ladeautomatik überwacht.

Technische Daten des Akkus:

- 6 V, 4 Ah



PRO-ACTIVE:

Akku versorgt nicht das Gerät!

Der Akku versorgt ausschließlich die Temperaturüberwachung mit Strom. Der Akku gewährleistet nicht den Betrieb des Geräts und damit den Erhalt der Innenraumtemperatur.



ULTIMATE:

Der Akku versorgt nicht die ULTIMATE-Bedienoberfläche!

Der Akku versorgt ausschließlich die Temperaturüberwachung mit Strom. Der Akku gewährleistet nicht den Betrieb der ULTIMATE-Bedienoberfläche und auch nicht den Erhalt der Innenraumtemperatur.

Die Temperaturkurve der Bedienoberfläche wird nach dem Beheben des Stromausfalls aktualisiert.

1.6 Zusätzliche Gerätekomponenten

Das Gerät verfügt über eine Standardausstattung.

Die Standardausstattung kann um weitere Gerätekomponenten ergänzt werden.

Folgende zusätzlichen Komponenten stehen für das Gerät zur Verfügung:

- PC-KIT-NET (serienmäßig bei ULTIMATE)
- Tauwasserschale zur man. Entleerung (für die meisten Geräte erhältlich)
- Glastür mit Schloss*
- Fahrbare Ausführung*
- Außengehäuse Chromnickelstahl*
- Tischplatte*
- Dekorrahmen

- Digitale Temperaturanzeige vorbereitet zum externen Einbau in Möbelfront*
- Türkoppelungs-Beschlag
- Kältemaschinen-Ventilator, eingebaut*
- Reinraum-Kit
- Innenbeleuchtung
- Vario Support*
- oberstes Schubfach abschließbar
- Rost mit Auflegern oder Schienen*
- Drahtkorb mit Schienen*


* nicht für alle Modelle erhältlich

1.6.1 Temperaturdokumentation


Das Gerät kann optional mit einer weiteren Temperaturdokumentation ausgestattet werden.



Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der zusätzlichen Gerätekomponenten.

Weiterführende Informationen zu Installation und Verwendung der jeweiligen Dokumentation des Produkts entnehmen.

Informationen zur Software für die Temperaturdokumentation der  „Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-NET“ entnehmen.


Tab. 5: Optionen zur Temperaturdokumentation

Bezeichnung	Funktion	Abbildung
<p>PC-KIT-NET mit Kirsch Datenet</p>	<p>Mit unserer Software KIRSCH-DATANET können Ihre Geräte mühelos in Ihrem IT-Netzwerk dokumentiert werden. Bei KIRSCH-Geräten der ULTIMATE-Linie ist die Netzwerklösung (PC-KIT-NET) bereits serienmäßig enthalten. Optional können die Geräte der PRO-ACTIVE-Linie damit aufgerüstet werden. Auch ältere Geräte können mit dieser nachrüstbaren Lösung ein Upgrade erhalten.</p> <p>Automatische Temperaturdokumentation und Monitoring über das Netzwerk (LAN).</p> <p>Unbegrenzte Einbindung von Geräten möglich.</p> <p>Gleichzeitiger Datenzugriff für bis zu 20 Clients je Server. 2 Server-Zugriffe möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lückenlose Temperaturdokumentation ■ Permanente Überwachung ■ Alarmweiterleitung per E-Mail ■ Genaue Datenauswertung und Fehleranalyse möglich, da alle Schaltzustände des Kühlschranks aufgezeichnet werden ■ Keine Lizenzgebühren für die Software ■ Minimaler Personalaufwand für Dokumentation ■ Kühlschrank-Einstellungen lassen sich bequem vom PC aus ändern ■ Benutzerverwaltung mit konfigurierbaren Berechtigungsstufen ■ Erstellung von Benutzergruppen mit eigener Rechteverwaltung 	

Bezeichnung	Funktion	Abbildung
<p>Cloud Modul</p>	<p>Zuverlässig</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarmierung bei Abweichung per SMS und/oder E-Mail ■ Alarmkette mit Holiday-Funktion (Umleitung der Alarmmeldung bei Abwesenheit) ■ Temperaturkontrolle, standortunabhängig jederzeit via Smartphone, Tablet oder PC möglich ■ Zusätzlich integrierte Datenspeicherung bis zu 30 Tage ■ Lückenlose Temperaturdokumentation <p>Unabhängig</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Netzwerkunabhängig, keine LAN- oder WLAN-Verbindung erforderlich ■ Datenübertragung via integrierter IoT SIM-Karte ■ Einfache Nachrüstung von Bestands- oder Fremdgeräten ■ Akku-Betrieb bei Stromausfall ■ Mobiler Einsatz möglich <p>Smart</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Automatische Berichterstattung ermöglicht einfache Datensicherung und -nachweise ■ Alle relevanten Daten jederzeit im Blick durch Abruf auf Smartphone, Tablet oder PC ■ Einfache und intuitive Bedienung durch moderne Menüführung ■ Benutzerverwaltung mit Rechtevergabe ■ Logbuch zur Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und Alarmgebungen mit Download-Funktion ■ Offline-Funktion für Service, Wartung oder Reinigung 	
<p>Externe Temperaturlaufzeichnung</p>	<p>Der Fühler ermöglicht die Temperaturmessung und Weitergabe der Daten an bereits vorhandene, bauseitige Schnittstellen.</p> <p>Die Kompatibilität muss gegebenenfalls durch den Anwender/Betreiber geprüft werden.</p>	

1.6.2 Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung (optional)

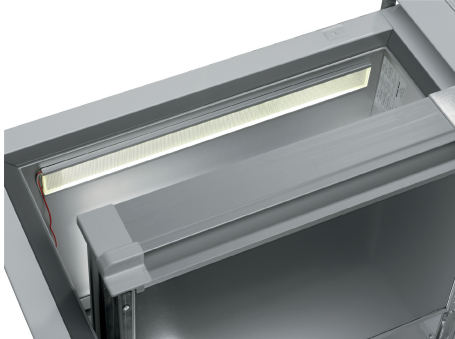

Das Gerät ist optional mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet.

Die Innenbeleuchtung schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein und beim Schließen der Tür aus.

Bei Geräten mit Glastür kann die Innenbeleuchtung über die Taste [Licht] dauerhaft ein- und ausgeschaltet werden.

1.6.3 Abschließbare Glastür

Türschloss

Ihr Gerät kann mit einer abschließbaren Glastür ausgestattet werden.

Weiterführende Informationen zum Einbau der Glastür bei KIRSCH erfragen.



Beim Modell MED 126 PRO-ACTIVE ist die optionale Glastür nicht abschließbar.

1.6.4 Reinraum-Kit



Ihr Gerät kann mit einem Reinraum-Kit ausgestattet sein.

Ihre Vorteile

- Stand-Alone-Lösung: Keine bauseitigen Kosten für Einhausung des Geräts oder Absauganlage
- HEPA-Filter (entfernt 99,95% der Partikel)
- Das Gerät ist mit einem Ventil zur Differenzdruckmessung ausgestattet.
- Außengehäuse aus Edelstahl
- Tauwasserschale für die manuelle Entleerung
- Desinfektionsmittelbeständigkeit getestet
- Reinraumtauglichkeit geprüft siehe Reinraumzertifikat vom 22.01.2024 (Siehe [kirsch-medical.de](https://www.kirsch-medical.de) Reinraumzertifikat)



Vor Inbetriebnahme ist das Gerät zu reinigen/desinfizieren. Von uns geprüfte Reiniger siehe ↗ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 58.



Das Gerät mit dem Reinraum-Kit ist mit einem Temperaturfühler PT 1000 zur Überwachung der Verflüssiger Temperatur ausgerüstet. Dieser zusätzlich verbaute Temperaturfühler muss bauseits überwacht werden. Falls Sie keine Möglichkeit zur Überwachung des zusätzlichen Fühlers haben, sprechen sie uns bitte an -> KIRSCH EVOLUTION CLOUD zur Überwachung möglich.



Vor Inbetriebnahme, ggfs. im Zuge einer GMP Qualifizierung, sollte eine Partikelmessung am Gerät durchgeführt werden (Diese sollte direkt am vorschriftsmäßig installierten HEPA-Filter erfolgen , frühestens nach 10 Minuten Betriebszeit des Kühlschranks).

2 Zubehör

Das Gerät kann über folgendes Zubehör verfügen:

- KIRSCH EVOLUTION CLOUD MODUL

2.1 KIRSCH EVOLUTION CLOUD

2.1.1 Kommunikation



Abb. 4: Kreislauf_Cloud

Das Kirsch EVOLUTION MODUL sammelt und speichert Temperatur-/ Eingangsdaten eines Geräts das überwacht werden soll.

Mit Hilfe von mobilem Internet werden die Daten an die KIRSCH CLOUD weiter gesendet.

Es handelt sich um eine spezielle Provider unabhängige IOT SIM Karte, die eine bestmögliche Netzabdeckung ermöglicht. Bei Änderung der Verbindungsqualität verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Netz mit dem stärksten Empfang.

Nach dem erfolgreichen Empfangen der Daten von der KIRSCH CLOUD, werden diese modifizierungssicher gespeichert und unverändert dem Kunden zur Auswertung angezeigt.

2.1.2 Datenspeicherung

Datenspeicherung im MODUL

Um eine lückenlose Temperaturdokumentation zu garantieren werden Daten immer zuerst im Speicher des Geräts abgelegt. Bei einem Verbindungsfehler sind die Daten nicht verloren.

Diese werden nach erneuter Herstellung der Verbindung automatisch aus dem internen Speicher an die Cloud übermittelt, bis die Cloud bestätigt, dass die Daten vollständig sind.

Das Logging von Daten erfolgt in einem Intervall von 2 Minuten auf dem im Modul integrierten Ringspeicher. Die Speicherkapazität beträgt maximal 30 Tage. Um den 31. Tag zu speichern wird der Datensatz des ersten Tages überschrieben.

Datenspeicherung in der CLOUD

Die Daten werden in der Cloud modifizierungssicher gespeichert und für die Vertragsdauer für den Anwender vorgehalten.

Weiterhin werden alle vom Gerät aufgezeichneten Daten in Tagesberichten gespeichert (falls Tagesbericht bei der Konfiguration des Geräts ausgewählt wurde). Diese können nachträglich in der Cloud abgerufen werden.

3 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Patienten und Personals sowie für die sichere und störungsfreie Nutzung des Geräts.

Die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

3.1 Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanweisung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden und maximale Patientensicherheit zu gewährleisten, Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln.



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.





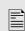
Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Tipps und Empfehlungen



Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für eine effiziente und störungsfreie Nutzung des Geräts hervor.

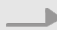Weitere Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Erläuterung
	Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisungen
	Ergebnisse von Handlungsschritten
	Verweise auf Abschnitte dieser Gebrauchsanweisung
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge
	Verweise auf Gebrauchsanweisungen von Zubehör und Optionsteilen

3.2 Zweckbestimmung

Der Medikamentenkühlschrank und der Medikamentengefrierschrank dienen der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Gerät dient dazu, die vorgeschriebene Kühlkette für das Kühlgut zu erhalten und das Kühlgut gemäß den Herstellervorgaben dauerhaft zu lagern. Der Medikamentenkühlschrank und der Medikamentengefrierschrank sind keine Medizinprodukte.

Das Gerät verfügt gemäß DIN 13277 „Kühlgeräte für Arzneimittel“ über eine abschließbare Tür.

3.3 Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Das Gerät ist nicht für den privaten Gebrauch vorgesehen. Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von Kühlgut gemäß der Zweckbestimmung.

Das Gerät nicht verwenden, um warmes Kühlgut herabzukühlen. Im Gerät kein Kühlgut lagern, dessen Kühlkette während der Lieferung oder Umlagerung bereits unterbrochen wurde.

Im Gerät keine Lebensmittel oder Getränke lagern.

Kein Kühlgut lagern, das die Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer überschreitet.

3.4 Restrisiken

Infektion des Anwenders



WARNUNG!

Infektionsgefahr bei unzureichender Hygiene, Desinfektion und Sterilisation!

Bei Kontakt mit nicht gereinigten, nicht sterilisierten oder nicht desinfizierten Teilen besteht Infektionsgefahr.

- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.
- Das Gerät vor der ersten Befüllung reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.

Austretendes Kältemittel



WARNUNG!

Gefahr durch austretendes Kältemittel!

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Heiße Oberfläche



WARNUNG!

Gefahr durch heiße Oberfläche!

An den gekennzeichneten Stellen des Geräts kann es bei Berührung zu schweren Verletzungen der Haut führen.

- Bitte entsprechend gekennzeichnete Stellen am Gerät nicht berühren.
- Diese Stellen sind sehr heiß und können auch mehrere Stunden nach dem Ausschalten des Geräts Verbrennungen verursachen.

Bei Eco-Kältemaschinen



WARNUNG!

Gefahr durch unerlaubten Eingriff in den Kältekreislauf!

Die Kältemaschine enthält das natürliche Kältemittel Propan R290 / Isobutan R600a. Das verwendete Kältemittel des Geräts ist brennbar und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen. Bei unerlaubtem Eingriff in den Kältekreislauf besteht Verletzungsgefahr!

- Vor Ort ist ausschließlich ein Komplettaustausch der Kältemaschine möglich.

Die Kältemaschine ist im Sinne der EN 1127-1 ein technisch dauerhaft dichtes System.

Kontamination des Kühlguts



VORSICHT!

Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

Blockierte Belüftung innen



VORSICHT!

Gefahr von Sach- und Personenschäden durch blockierte innere Belüftung!

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine ist die Luftzirkulation im Inneren des Geräts nicht mehr gegeben. Hierdurch kann es zu einem Temperaturgefälle innerhalb des Geräts kommen, wodurch Kühlgut beschädigt werden kann.

- Sicherstellen, dass die Belüftung im oberen Bereich frei ist.
- Lüftungsgitter nicht durch Kühlgut abdecken.

Fehlende Stromversorgung



VORSICHT!

Gefahr von Sach- und Personenschäden durch fehlende Stromversorgung!

Der Akku versorgt bei einem Stromausfall nur die Warneinrichtung mit Strom. Das Kühlaggregat wird abgeschaltet, was das Kühlgut beschädigen oder zerstören kann.

- Sicherstellen, dass das Gerät vor Stromausfall geschützt ist (beispielsweise durch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung).
- Nach einem Stromausfall sicherstellen, dass das Kühlaggregat wieder mit Strom versorgt wird.
- Bei Bedarf Kühlgut umlagern und den Service informieren.

Blockierte Belüftung außen



HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden bei blockierter äußerer Belüftung!

Ohne ausreichende Belüftung der Kältemaschine kann das Gerät überhitzen und beschädigt werden.

- Geräte nicht dicht nebeneinander aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Belüftung (hinten und vorne) am Gerät frei ist.
- Kältemaschine nicht abdecken.
- Gerät nur von qualifiziertem Personal einbauen lassen.

3.5 Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit

Datenschutz

Der Schutz personenbezogener Gesundheitsdaten ist ein wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie. Zum Schutz von personenbezogenen Daten und für die ordnungsgemäße Gerätefunktion muss der Benutzer die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen gemäß den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien der Einrichtung ergreifen. Kirsch empfiehlt Gesundheitsorganisationen oder medizinischen Einrichtungen, eine umfassende und mehrstufige Strategie zu implementieren, um die Daten und Systeme vor internen und externen Sicherheitsbedrohungen zu schützen.

Für die Sicherheit der Patienten und ihrer personenbezogenen Gesundheitsdaten muss der Benutzer Maßnahmen ergreifen, die Folgendes beinhalten:

1. ➤ **Physische Schutzmaßnahmen** - physische Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass unbefugtes Personal keinen Zugriff auf den Kühlschrank hat.
2. ➤ **Betriebliche Schutzmaßnahmen** - Sicherheitsmaßnahmen während des Betriebs.

3. Administrative Schutzmaßnahmen - Sicherheitsmaßnahmen im Management.
4. Technische Schutzmaßnahmen - Sicherheitsmaßnahmen im technischen Bereich.



WARNUNG! **IT-Umgebung**

Stellen Sie sicher, dass Netzwerkfunktionen nur in einer abgesicherten Netzwerkumgebung verwendet werden.



VORSICHT!

Beim Aufbau der Netzwerkumgebung:

- Wenn ein WLAN-Router verwendet wird, aktivieren Sie die MAC-Adressenfilterfunktion des WLAN-Routers, und fügen Sie die MAC-Adresse des Geräts zur Regelliste hinzu. Der Wireless-Router lässt nur zu, dass Geräte in der Regelliste auf das Wireless-Netzwerk zugreifen.
- Es wird empfohlen, ein VLAN zu erstellen, und die LAN-Ports, an denen sich der genehmigte Switch-Port, das Gerät / der Kühlschrank, demselben VLAN zuzuweisen und sie von anderen VLANs zu isolieren.



VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass alle Gerätekomponenten, die persönliche Daten verwalten (außer Wechselmedien), physisch sicher sind.



VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank nur mit dem von Kirsch autorisierten/zugelassenen Gerät verbunden ist. Benutzer sollten alle von Kirsch bereitgestellten und unterstützten Geräte innerhalb von durch Kirsch autorisierte Spezifikationen betreiben, einschließlich von Kirsch genehmigter Software, Softwarekonfiguration, Sicherheitskonfiguration usw.



VORSICHT!

Schützen Sie alle Kennwörter vor unbefugten Änderungen.



VORSICHT!

Vor der Verwendung des USB-Flashlaufwerks sollten Virenschutzmaßnahmen, z. B. eine Virenprüfung des USB-Geräts, durchgeführt werden.



VORSICHT!

Firewalls und/oder andere Sicherheitseinrichtungen sollten zwischen dem medizinischen System und allen extern zugänglichen Systemen installiert werden. Es wird empfohlen, die Defender Firewall für Schnittstellen oder eine andere Firewall zu verwenden, die vor DoS- und DDoS-Angriffen schützt, und diese stets auf dem neuesten Stand zu halten.




VORSICHT!


Der DoS- und DDoS-Schutz des Routers muss aktiviert sein, damit dieser gegen Attacken geschützt ist.

3.6 Sicherheitskennzeichnungen


Typenschild

1 Modell Type	MED 100 PRO-ACTIVE	Kühl-Inhalt Gross volume	95 Liter	6
2 SN	100 30 35000	UDI	---	7
3 Kältemittel Refrigerant	R600a 0,043 kg	Kühl-Aggregat Cooling system	VKD 2715 K	8
4 Wechselstrom Voltage	220-240V~50/60 Hz	Stromaufnahme Power input	0,22 A	9
5 Nutzraumtemperaturbereich Usable- space temperature	+5°C	Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature	10°bis 38°C	10





DIN 13277







Philipp Kirsch GmbH
Im Lössenfeld 14
DE-77731, Willstätt-Sand
Tel.: +49 781 9227-0
Web: www.kirsch-medical.com

Abb. 5: Beispiel für ein Typenschild (MED 100 PRO-ACTIVE)

Das Typenschild enthält folgende Angaben (Angaben entsprechen der roten Nummer):

- 1 - Modell
- 2 - Seriennummer / Fabriknummer
- 3 - Kältemittel
- 4 - Wechselstrom
- 5 - Nutzraumtemperaturbereich
- 6 - Kühlinhalt
- 7 - UDI- Kennung ausschließlich bei BL Geräten
- 8 - Kühlaggregat
- 9 - Stromaufnahme
- 10 - Umgebungstemperaturbereich

Symbol	Bedeutung
	CE-Kennzeichnung

	Gebrauchsanweisung lesen
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Seriennummer / Fabriknummer
	Achtung
	Altgeräte sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nicht fest verbaute Batterien oder Akkus müssen vorher entnommen und getrennt entsorgt werden.

3.7 Personalqualifikation

Unzureichende Qualifikation des Personals



WARNUNG!

Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden beim Patienten zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

Personalqualifikationen

In dieser Anleitung werden die im Folgenden aufgeführten Qualifikationen des Personals für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

Anwender

Der Anwender ist derjenige, der das Gerät gemäß seiner Zweckbestimmung verwendet und bedient. Das Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal verwendet und bedient werden.

Der Anwender ist in der technisch richtigen und sicheren Nutzung des Geräts gemäß geltender Gesetze und Verordnungen eingewiesen.

Gerätebeauftragter

Der Gerätebeauftragte ist diejenige Person, die vom Betreiber des Geräts für diese Aufgabe bestimmt und in seine Tätigkeiten eingewiesen wurde.

Den Namen des Gerätebeauftragten und das Datum der Einweisung in das Medizinproduktebuch eintragen und durch die Unterschrift bestätigen.

Der Gerätebeauftragte erfüllt folgende Voraussetzungen:

- Der Gerätebeauftragte kennt die Zweckbestimmung, den vorhersehbaren Fehlgebrauch und die Restrisiken des Geräts.
- Der Gerätebeauftragte ist mit der Gebrauchsanweisung und allen weiteren sicherheitsbezogenen Dokumenten vertraut.
- Der Gerätebeauftragte ist in die technisch richtige und sichere Handhabung des Geräts eingewiesen.

Der Gerätebeauftragte übernimmt folgende Tätigkeiten:

- Der Gerätebeauftragte weist die Anwender in die Handhabung des Geräts ein.

System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)

Der System-/Netzwerkadministrator ist aufgrund seiner Ausbildung, seiner IT-Kenntnisse und Erfahrung in der Lage, die Systemvoraussetzungen und die Arbeitsumgebung, samt technischem Equipment, für die Anwendung der Software zu schaffen.

Der System-/Netzwerkadministrator übernimmt folgende Aufgaben:

- Installation von KIRSCH-DATANET
- Einbindung des Geräts in das Netzwerk

Der System-/Netzwerkadministrator wurde vom Betreiber autorisiert, die Benutzer der Software zu verwalten und Einstellungen an der Software vorzunehmen.

Allgemeine Anforderungen zur Personalqualifikation

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

3.8 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Personal gegen Gefahren zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen könnten.

Die in den verschiedenen Kapiteln dieser Anleitung geforderte persönliche Schutzausrüstung vor Beginn der jeweiligen Arbeit unbedingt anlegen.

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät muss das Personal persönliche Schutzausrüstung tragen. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese persönliche Schutzausrüstung erläutert:



Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor aggressiven Chemikalien.



Schutzhandschuhe

Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.



Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf rutschigem Untergrund.

4 Transport und Stilllegung

4.1 Gerät transportieren

Bei Auslieferung wird das Gerät in Absprache mit dem Fachhändler transportiert.

Bei einem Transport im Rahmen einer Standortänderung während der Betriebsdauer des Geräts die folgenden Sicherheitshinweise beachten.

Sicherheit beim Transport



WARNUNG!

Gefahr von Quetschverletzungen bei Umkippen!

Wenn das Gerät geneigt wird, kippt es unkontrolliert um. Beim Umkippen des Geräts besteht die Gefahr, Hände und Füße zu quetschen.

- Beim Transport des Geräts Sicherheitsschuhe und Sicherheitshandschuhe tragen.
- Das Gerät stehend transportieren.



WARNUNG!

Gefahr durch austretendes Kältemittel!

Das verwendete Kältemittel des Geräts ist explosiv, steht unter Druck und kann bei Kontakt mit den Augen oder der Haut zu schweren Verletzungen führen.

- Bei Transport und Aufbau die Rohrleitungen und den Verdampfer nicht knicken oder aufstechen.
- Die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigen (beispielsweise ankratzen).
- Im Umgang mit dem Kältemittelkreislauf Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen.



HINWEIS!

Gefahr von Schaden am Tauwassergefäß!

Die in der folgenden Tabelle genannten Geräte sind unterseitig mit einem Tauwassergefäß ausgestattet, das bei unsachgemäßem Transport beschädigt werden kann:

- Gerät auf Palette stellen und transportieren.
- Gerät nicht ohne Palette mit Gabelstapler oder Hubwagen anheben.

MED 520 CR-HF PRO-ACTIVE

MED 720 CR-HF PRO-ACTIVE

Gerät wieder in Betrieb nehmen

Gerät an neuen Standort transportieren

- Schutzausrüstung: ■ Sicherheitsschuhe
■ Schutzhandschuhe

Gerät außer Betrieb nehmen wie in Abschnitt ↗ „Gerät stilllegen“ auf Seite 34 dargestellt.

1. ➤ Gerät an neuen Aufstellort transportieren.




Wartezeit bis zur Wiederinbetriebnahme:

Nach Transport und Aufstellung eine Stunde bis zur Wiederinbetriebnahme warten, damit sich das Kältemittel gleichmäßig im Kältemittelkreislauf verteilen kann.

2. ➤ Gerät wieder in Betrieb nehmen wie in Abschnitt ↗ „Gerät wieder in Betrieb nehmen“ auf Seite 34 dargestellt.

4.2 Gerät stilllegen

Gerät stilllegen

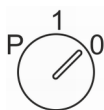


1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.
3. ➤ Netzstecker ziehen.
4. ➤ Geräteschlüssel abziehen.
5. ➤ Gerätetür geöffnet lassen, um Geruch- und Schimmelbildung zu vermeiden.

4.3 Gerät wieder in Betrieb nehmen

Gerät wieder in Betrieb nehmen

Gerät vor Wiederinbetriebnahme reinigen und desinfizieren
↗ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 58.

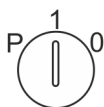

1. ➤ Netzstecker einstecken.
2. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
3. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.
⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.
4. ➤ Solltemperatur prüfen und gegebenenfalls einstellen
↗ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 40.



Vorlaufzeit des Temperaturalarms!

Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.

In diesem Zeitraum werden auch keine Temperatur-Alarmmeldungen über den Potentialfreien Kontakt ausgegeben.

5. → Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät mit dem Kühlgut beschicken.

5 Aufbau, Einbau und Anschluss

5.1 Gerät aufstellen

Aufstellen

Beim Aufstellen des Geräts folgende Aufstellbedingungen einhalten:

- Innengebrauch
- Höhe bis zu 2000 m ü.d.M.
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit 75% für Temperaturen bis 31°C linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 38°C bzw 32°C bei FROSTER
- Transiente Überspannungen bis zu Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2
- Für Kühlschränke muss die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +38°C sichergestellt werden (gemäß Klimaklasse SN und ST).
- Für Froster muss die Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C sichergestellt werden (gemäß Klimaklasse SN).
- Trockenem und gut belüfteten Aufstellort wählen.
- Gerät nicht neben Wärmequellen aufstellen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Gerät auf fester, ebener Fläche aufstellen.
- Unebenheiten über die verstellbaren Standfüße ausgleichen.
- Lüftungsgitter nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Kältemaschine nicht abdecken, zustellen oder verblenden.
- Zwischen Wand und Gerät einen Mindestabstand von 2 cm einhalten (beispielsweise durch den Abstandshalter).
- Zwischen 2 Geräten einen Mindestabstand von 2 cm einhalten.
- Das Mindestraumvolumen am Aufstellort zur Vermeidung explosionsfähigen Atmosphäre nach DIN EN378-1 bei Verwendung von Kühl- und Gefriergeräten mit brennbaren Kältemitteln (R600a, R290a) ist einzuhalten.



Bemessungsgrundlage für das Mindestraumvolumen des Aufstellungsortes ist die größte Kältemittel-Füllmenge der vorhandenen bzw. geplanten Kühlgeräte. Die jeweilige Kältemittelfüllmenge entnehmen Sie der Tabelle ↗ Kapitel 13.2 „Technische Daten“ auf Seite 79.

R600a: Volumen = Kältefüllmenge / 8,6 g/m³

R290a: Volumen = Kältefüllmenge / 7,6 g/m³

5.2 Gerät einbauen

Übersicht einbaufähige Geräte

MED 100 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE
MED 126 PRO-ACTIVE	FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE

Einbauen

Den Einbau des Geräts ausschließlich durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen. Im Zweifel KIRSCH kontaktieren ☎ „Herstelleradresse“ auf Seite 4.

Das Gerät einbauen wie in der beiliegenden Einbauzeichnung dargestellt.

Die vorgegebenen Lüftungsquerschnitte für Zu- und Abluft sind zwingend einzuhalten. Bei manchen Modellen kann der Einbau des optionalen Kältemaschinenventilators notwendig sein.

5.3 Gerät anschließen

Anschließen



Das Gerät ist nach Schutzklasse I und Schutzart IP 20 ausgeführt und steckerfertig.

Die Anschlussbedingungen gemäß den Technischen Daten und dem Typenschild sicherstellen.

1. ➤ Anschlusskabel des Netzsteckers auf Beschädigungen prüfen.
2. ➤ Netzstecker einstecken.

Potentialfreien Kontakt / Netzwerkkabel anschließen

Alle Geräte der PRO-ACTIVE/ULTIMATE Baureihe sind serienmäßig mit einem Potentialfreien Kontakt zur Alarmweiterleitung ausgestattet.

Geräte der PRO-ACTIVE Baureihe können als Option mit einer Netzwerkschnittstelle (PC-KIT-NET) ausgestattet sein.

Geräte der ULTIMATE Baureihe sind serienmäßig mit einer Netzwerkschnittstelle (PC-KIT-NET) ausgestattet.

Tab. 6: Anschluss der Schnittstellen

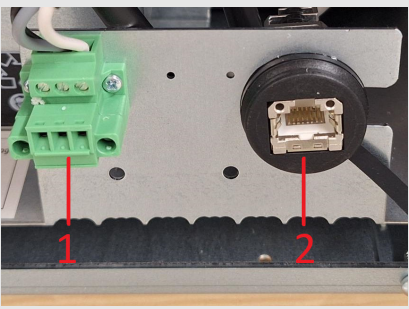
Bild der Schnittstellen	Beschriftung	Lage der Anschlussklemme
	1) Potentialfreier Kontakt 2) Netzwerkschnittstelle	95-/100-/200-Liter: rückseitig unten im Maschinenraum

Bild der Schnittstellen	Beschriftung	Lage der Anschlussklemme
	1) Potentialfreier Kontakt 2) Netzwerkschnittstelle	126-/280-/330-/460-Liter: rückseitig oben im Aufsatz
	1) Potentialfreier Kontakt 2) Netzwerkschnittstelle	520-/720-Liter: oben im Maschinenraum

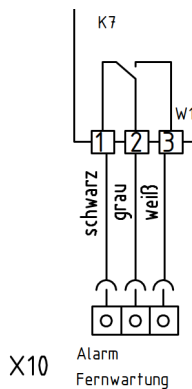


Abb. 6: Potentialfreier Fernwarnkontakt_Schaltplan_PRO-ACTIVE



Wir empfehlen den Anschluss als Öffner, da so auch ein Kabelbruch über den Potentialfreien Kontakt gemeldet wird.



Es ist zu beachten, dass die Geräte nach Inbetriebnahme eine Alarmunterdrückungszeit von 120 Minuten haben, so dass das Gerät nicht alarmiert, während es herunterkühlt.

In diesem Zeitraum gibt auch der Potentialfreie Kontakt kein Signal aus.

Es besteht die Möglichkeit den Potentialfreien Kontakt als Öffner oder als Schließer zu konfigurieren:

- Klemme 1 + 3 als Öffner
- Klemme 1 + 2 als Schließer

6 Inbetriebnahme

Personal: ■ Gerätebeauftragter

6.1 Tätigkeiten bei Inbetriebnahme

Reihenfolge der Inbetriebnahme



WARNUNG!

Gefahr von Sach- und Personenschäden bei Inbetriebnahme durch unqualifiziertes Personal!

Durch unsachgemäße Inbetriebnahme durch nicht dafür qualifiziertes Personal kann erheblicher Schaden am Kühlgut entstehen, der schwere Personenschäden zur Folge haben kann.

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.

Die Inbetriebnahme besteht aus folgenden Tätigkeiten:

- 1 - Gerät innen reinigen und desinfizieren ↪ *Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 58.*
- 2 - Gerät einschalten ↪ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.*
- 3 - Gerät programmieren ↪ *Kapitel 6.2 „Gerät programmieren“ auf Seite 39.*
- 4 - Erreichen der Solltemperatur abwarten.
- 5 - Gerät beschicken ↪ *Kapitel 7.7 „Gerät beschicken“ auf Seite 55.*

6.2 Gerät programmieren

Schlüssel nicht in falsche Hände geben



HINWEIS!

Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.

6.2.1 Solltemperatur

6.2.1.1 Funktion der Solltemperatur

Die Solltemperatur legt fest, bei welcher Temperatur das Gerät betrieben wird, um das Kühlgut unter optimalen Bedingungen zu lagern.

Die Solltemperatur des Geräts ist durch KIRSCH voreingestellt.



Änderungen des Sollwerts verändern nicht die Temperaturwarngrenzen. Diese werden manuell angepasst
↳ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 40.

6.2.1.2 Solltemperatur anzeigen und ändern

Änderungen nur durch qualifiziertes Personal



WARNUNG!

Gefahr durch Manipulation der Sollwerttemperatur!

Die werksseitig eingestellten Werte für die Solltemperatur entsprechen den gültigen DIN-Normen. Unsachgemäße Änderung an der Solltemperatur und den Temperaturwarngrenzen können irreparable Schäden am Kühlgut und auch am Gerät herbeiführen.

Wenden Sie sich im Zweifel an unseren Service
↳ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

Solltemperatur anzeigen



→ Taste [Solltemperatur] drücken.

⇒ Die aktuelle Solltemperatur wird angezeigt.

Solltemperatur ändern

1. ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.




HINWEIS!

Gefahr durch fehlerhafte Programmierung!

Mit Hilfe des Schlüssels kann über die Schlüsselposition „P“ auf die Programmierfunktionen des Geräts zugegriffen werden. Eine für das Kühlgut ungeeignete Programmierung kann zu Schäden am Kühlgut führen.

- Die Programmierung von qualifiziertem Personal durchführen lassen.
- Nach der Programmierung den Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen und den Schlüssel abziehen.
- Schlüssel gegen unbefugten Zugriff sichern.
- Das Gerät nicht in Schlüsselposition „P“ betreiben.

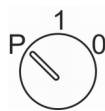


2. ➔ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.



3. ➔ Taste [Solltemperatur] gedrückt halten.



4. ➔ Über die Taste [Min.] oder [Max.] den gewünschten Sollwert einstellen.

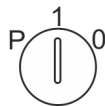

5. ➔ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Gerät reguliert die Temperatur auf den angegebenen Sollwert.



Temperaturverlauf beobachten!


Das Gerät erreicht den neuen Sollwert nicht unmittelbar nach der Änderung.

Den Temperaturverlauf am Display oder über eine optionale Temperaturdokumentation (z. B. KIRSCH-PC-KIT) beobachten.


6. ➔ Aktuelle Temperatur ablesen und den weiteren Temperaturverlauf beobachten, bis die Solltemperatur erreicht ist.



Folgen der geänderten Solltemperatur

Sobald die Solltemperatur erreicht ist, müssen die Temperaturwarngrenzen so eingestellt werden, dass die Solltemperatur ober- bzw. unterhalb der Solltemperatur liegen. Andernfalls wird der Temperaturalarm ausgelöst  Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 43.

Die eingestellte Solltemperatur wird automatisch gespeichert. Die Solltemperatur bleibt nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.

- 7.**  Wenn das Gerät die Solltemperatur erreicht hat, das Gerät beschicken.

6.2.2 Temperaturwarngrenzen

6.2.2.1 Funktion der Temperaturwarngrenzen

Die Temperaturwarngrenzen legen fest, welche Abweichung der Isttemperatur zur Solltemperatur durch das Gerät toleriert werden. Die Temperaturwarngrenzen sind gerätespezifisch. Sie sind an die Anforderung des Kühlguts anpassbar.

Die Werte für die Temperaturwarngrenzen sind werksseitig eingestellt und entsprechen den gültigen DIN-Normen für das Gerät.



Empfohlene Temperaturwarngrenzen


Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.

Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:

- Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur
- Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur



Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER

Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle  „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 43 einzustellen.

Temperaturwarngrenzen

Tab. 7: Temperaturwarngrenzen MED und FROSTER MED

Modell	Untere Temperaturwarngrenze	Solltemperatur	Obere Temperaturwarngrenze
MED 100 PRO-ACTIVE	+2 °C	+5 °C	+8 °C
MED 126 PRO-ACTIVE			
MED 200 PRO-ACTIVE			
MED 288 PRO-ACTIVE			
MED 340 PRO-ACTIVE			
MED 468 PRO-ACTIVE			
MED 520 PRO-ACTIVE			
MED 520 CR PRO-ACTIVE			
MED 720 PRO-ACTIVE			
MED 288 ULTIMATE			
MED 340 ULTIMATE			
MED 468 ULTIMATE			
MED 520 ULTIMATE			
MED 720 ULTIMATE			
MED 520 CR-HF PRO-ACTIVE			
MED 720CR-HF PRO-ACTIVE			
FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	-35 °C	-20 °C	-10 °C

6.2.2.2 Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern

Temperaturwarngrenzen anzeigen

Obere Temperaturwarngrenze



1. Taste [Temperaturwarnung max.] drücken.
⇒ Die obere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

Untere Temperaturwarngrenze



2. Taste [Temperaturwarnung min.] drücken.
⇒ Die untere Temperaturwarngrenze wird im Display angezeigt.

Temperaturwarngrenzen ändern



Empfohlene Temperaturwarngrenzen

Die Temperaturwarngrenzen dürfen nicht der Solltemperatur entsprechen.


Die Temperaturgrenzen wie folgt einstellen:

- Obere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C höher als die Solltemperatur
- Untere Temperaturwarngrenze: mindestens 3 °C tiefer als die Solltemperatur



Empfohlene Temperaturwarngrenzen FROSTER

Um die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts zu gewährleisten sind für FROSTER-Modelle die Temperaturwarngrenzen gemäß Tabelle ↗ „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 43 einzustellen.

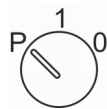

1. ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.

2. ➔ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.




3. ➔ Taste [Temperaturwarnung max.] drücken und gedrückt halten.



4. ➔ Taste [Max.] so oft drücken, bis der Wert für die neue obere Temperaturwarngrenze erreicht ist.



5. ➔ Taste [Min.] so oft drücken, bis der Wert für die neue untere Temperaturwarngrenze erreicht ist.

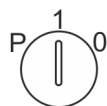

6. ➔ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

⇒ Das Display zeigt die aktuelle Innenraumtemperatur.



Die eingestellten Temperaturwarngrenzen werden automatisch gespeichert. Die Temperaturwarngrenzen bleiben nach einem Stromausfall oder Abschalten des Geräts erhalten.

6.2.3 Luftfeuchte einstellen

Übersicht Geräte mit einstellbarer Luftfeuchte

MED 288 PRO-ACTIVE	MED 288 ULTIMATE
MED 340 PRO-ACTIVE	MED 340 ULTIMATE
MED 468 PRO-ACTIVE	MED 468 ULTIMATE
MED 520 PRO-ACTIVE	MED 520 ULTIMATE

MED 520 CR PRO-ACTIVE	MED 520 CR ULTIMATE
MED 720 PRO-ACTIVE	MED 720 ULTIMATE
MED 520 CR-HF PRO-ACTIVE	MED 720 CR-HF PRO-ACTIVE

Luftfeuchte einstellen

Für den Innenraum des Geräts kann zwischen 2 Luftfeuchten gewählt werden:


hohe Luftfeuchte - ca. 90 %

niedrige Luftfeuchte - ca. 65 %



Bei Einstellung „hohe Luftfeuchte“ ist das Umluftgebläse im Innenraum permanent in Betrieb und schaltet nur bei Türöffnung aus. Bei Einstellung „niedrige Luftfeuchte“ schaltet das Gebläse nach jedem Stillstand der Kältemaschine für kurze Zeit ab.

1. ▶ Geräteschlüssel in den Schlüsselschalter stecken.

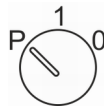


2. ▶ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.




3. ▶ Taste [Luftfeuchte] drücken und für mindestens 4 Sekunden gedrückt halten.

4. ▶ Luftfeuchte auswählen.

⇒ Nach Auswahl „hohe Luftfeuchte“ leuchtet die LED-Anzeige .

Nach Auswahl „niedere Luftfeuchte“ erlischt die LED-Anzeige.

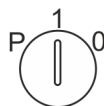


5. ▶ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.

7 Bedienung

 Personal: ■ Anwender

7.1 Gerät einschalten

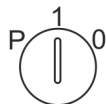

1. ➤ Schlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „1“ stellen.
⇒ Das Display zeigt die Innenraumtemperatur an.
3. ➤ Schlüssel abziehen und vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahren.
4. ➤ Solltemperatur prüfen oder gegebenenfalls einstellen
↳ Kapitel 6.2.1.2 „Solltemperatur anzeigen und ändern“ auf Seite 40.



Vorlaufzeit des Temperaturalarms!

Der Temperaturalarm ist frühestens aktiv, sobald die Solltemperatur erreicht wurde, oder spätestens nach 2 Stunden Betrieb des Geräts.


5. ➤ Gerät beschicken, wenn die Solltemperatur erreicht ist.



Tür öffnet schwergängig beim ersten Öffnen

Durch das Abkühlen entsteht im Innenraum Unterdruck, wodurch sich die Tür beim ersten Öffnen möglicherweise nur mit erhöhter Kraft öffnen lässt.

7.2 Gerät ausschalten

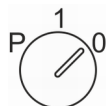

1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf Position „0“ drehen.
⇒ Das Gerät geht in den Standbybetrieb und das Display zeigt 0FF.



Beschicktes Gerät nur kurzfristig ausschalten!

Um das Kühlgut zu schützen, das Gerät nur kurzfristig ausschalten.

Um das Gerät für einen längeren Zeitraum stillzulegen, vorgehen wie in ↳ Kapitel 4.2 „Gerät stilllegen“ auf Seite 34 dargestellt.

7.3 Temperaturspeicher abrufen/löschen

Temperaturspeicher abrufen



Der Temperaturspeicher zeichnet die Temperatur ab dem Erreichen der Solltemperatur auf.

Ein Neustart des Geräts setzt den Temperaturspeicher zurück.



1. Taste *[Max.]* drücken.

⇒ Der Maximalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.



2. Taste *[Min.]* drücken.

⇒ Der Minimalwert des Temperaturspeichers wird angezeigt.

Temperaturspeicher löschen



1. Taste *[Max.]* drücken und gedrückt halten.



2. Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Das Display zeigt **- - -**.

Der Maximalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.



3. Taste *[Min.]* drücken und gedrückt halten.



4. Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Das Display zeigt **- - -**.

Der Minimalwert des Temperaturspeichers ist gelöscht.

7.4 Superfrost-Funktion einschalten

Die untere Temperaturwarngrenze des Geräts ist auf den kleinsten Wert eingestellt ↪ *Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 42.*

Superfrost einschalten



1. Taste *[Superfrost]* drücken.

⇒ Die LED-Anzeige  leuchtet.



Die Superfrost-Funktion läuft für 12 Stunden und wird automatisch beendet.

Superfrost manuell beenden



2. ➤ Taste [Superfrost] erneut drücken.
⇒ Die Superfrost-Funktion ist deaktiviert.
3. ➤ Untere Temperaturwarngrenze an die Solltemperatur anpassen ↪ Kapitel 6.2.2 „Temperaturwarngrenzen“ auf Seite 42.

7.5 Datenauslesung am Gerät mit PC-KIT-STICK

Daten auf USB speichern

Der Kühlschrank verfügt über die Möglichkeit, die gespeicherten Daten auf einen handelsüblichen USB-Stick (max. 32 GB, formatiert im Format FAT 32) zu exportieren. Dabei wird eine .json-Datei auf dem Stick abgelegt, die dann über die unten beschriebene Vorgehensweise in KIRSCH-Datanet ab Version 5.0 importiert werden kann. Um die Daten auf den USB-Stick zu speichern ist folgende Vorgehensweise anzuwenden:



HINWEIS!

Der interne Temperaturspeicher zeichnet die Daten bis zu 90 Tage auf. Somit ist eine regelmäßige Auslesung der Daten notwendig um Datenlücken zu vermeiden. Wir empfehlen die Auslesung der Daten in regelmäßigem Intervall, z.B. wöchentlich oder monatlich.



HINWEIS!

Die Übertragung kann auch im ausgeschalteten Zustand (Standby) vorgenommen werden.

Nr.:	Anweisung	Display
1	USB-Stick einstecken	Warten bis folgende Anzeige erscheint:
		Der Regler ist bereit zur Übertragung der Daten (weiter mit 2.)
		Der USB-Stick ist voll. Bitte leeren oder anderen Stick verwenden.
		USB-Stick-Fehler beim Zugriff auf Dateisystem bzw. Fehler beim Initialisieren des Dateisystems. Bitte anderen Stick verwenden.

Nr.:	Anweisung	Display
		<p>USB-Stick-Fehler</p> <p>Datenauslesung fehlgeschlagen, Neuinitialisierung notwendig. Hierzu Gerät über Schlüsselschalter ausschalten, dann Gerät für 1 Minute vom Netz trennen. Im Anschluss Gerät wieder in Betrieb nehmen und Datenauslesung starten</p> 
2	 Start-Taste drücken	<p>Die Daten werden auf den USB-Stick kopiert.</p> <p>ACHTUNG: Während des Kopiervorgangs auf keinen Fall den USB-Stick entfernen (siehe 5.)! Daten sonst unlesbar/korrupt. Ggf. erst den Vorgang abbrechen (siehe 4.).</p>  
3		<p>Sobald alle Daten erfolgreich kopiert wurden erscheint die Meldung „rdy“. Der USB-Stick kann dann abgezogen werden.</p> 
4	 Abbruch mit Stop-Taste	<p>Falls gewünscht kann der Kopiervorgang mit der Stop-Taste abgebrochen werden. Sobald die Anzeige „rdy“ erscheint kann der USB-Stick entfernt werden. Die Daten sind dann unvollständig.</p> 
5	Fehlermeldung	<p>Wird der Stick während des Kopiervorgangs abgezogen, so erscheint diese Meldung für ca. 5 Sek. Danach erscheint wieder die normale Temperaturanzeige.</p> 

Import der Daten in Kirsch Datenet

Verbindung aufbauen

Benutzername:

Passwort:

Server:

- KIRSCH-Datanet-Software Client öffnen und als Admin anmelden.


Die Standardzugangsdaten sind:

- Benutzername: Admin
- Passwort: admin




HINWEIS!

Falls die Standardzugangsdaten geändert werden und das Passwort nicht mehr auffindbar ist, besteht auch durch den Service von Kirsch keine Möglichkeit, dieses zurückzusetzen. Sie haben dann keinen Zugang mehr zur Datenbank!

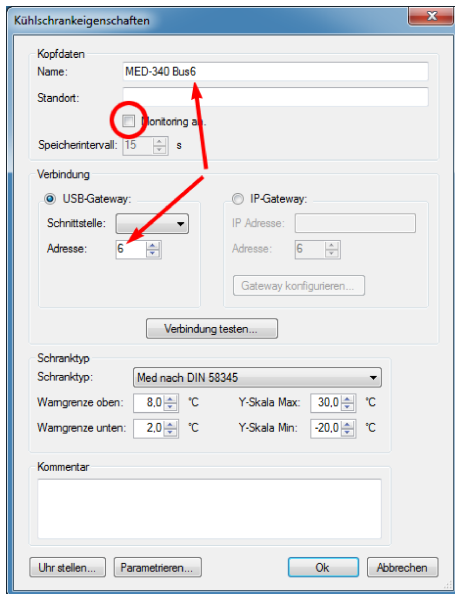


2. ➤ Neuen Kühlschrank über Menüpunkt „Verwaltung/Kühlschrank hinzufügen“ hinzufügen.
3. ➤ Es erscheint folgendes Fenster:
4. ➤ Name des Geräts und optional den Standort eintragen.
5. ➤ Haken bei „Monitoring an“ entfernen.
6. ➤ Falls mehrere Geräte verwaltet werden sollen USB-Export-Adresse einstellen.


! HINWEIS!
Jede Adresse kann nur einmal verwendet werden.

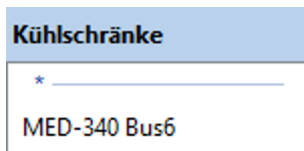


7. ➤ Schranktyp auswählen.
8. ➤ Mit „OK“ bestätigen.
9. ➤ Das neu angelegte Gerät erscheint im linken Fenster „Kühlschränke“.
10. ➤ USB-Stick in USB-Port am Computer einstecken.

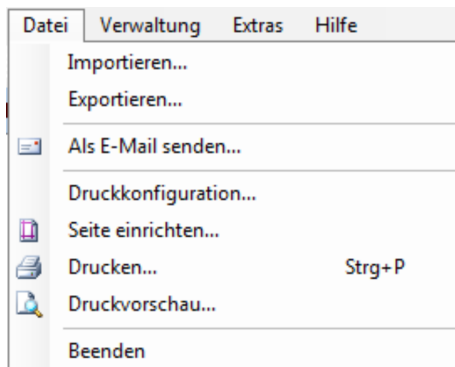

11. ➤ In der Software den Menüpunkt „Datei/Datei importieren“ auswählen.

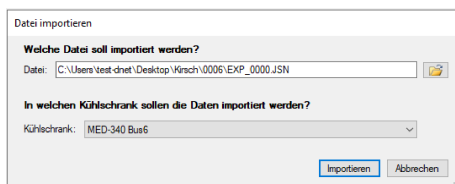

12. ➤ Über „Ordnersymbol“ die zu importierende .jsn-Datei vom USB-Stick auswählen.
13. ➤ Den gewünschten Kühlschrank auswählen.
14. ➤ „Importieren“ klicken um Daten zu importieren.

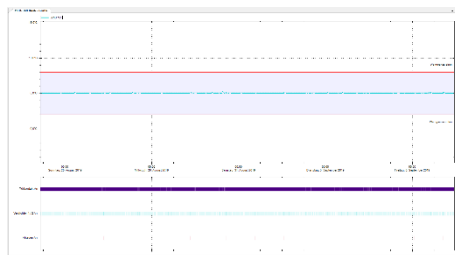

15. ➤ Die importierten Daten können über einen Doppelklick auf den gewünschten Kühlschrank angezeigt werden.

7.6 PC-KIT-NET einrichten (optional)

Tab. 8: Werkseinstellungen TCP/IP

IP-Adresse Gerät	192.168.0.101
Subnetzmaske	255.255.255.0
IP-Adresse Standard-Gateway	192.168.0.200



Falls mehrere Geräte in Betrieb genommen werden sollen, gilt:

Immer nur ein Gerät nach dem anderen mit dem Netzwerk verbinden und Netzwerkverbindung am PC abschließen.



Die IP-Adresse des Geräts und die IP-Adresse des Standard-Gateways müssen im gleichen Adressbereich konfiguriert werden:

IP-Adresse Gerät (Beispiel)	<u>180.160.15.1</u>
IP-Adresse Standard-Gateway (Beispiel)	<u>180.160.15.2</u>



Zur Temperaturüberwachung über das Netzwerk muss die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.5.0.0 oder höher) installiert sein (vollständige Montage- und Anschlussanleitung liegt PC-KIT-NET bei).


IP-Adresse am Gerät einrichten




Jedes Gerät benötigt eine eigene feste IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.


DHCP wird nicht unterstützt.


Werkseitig lautet die IP-Adresse: 192.168.0.101

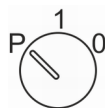



- ➔ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
- ➔ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
- ➔ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.
⇒ Das Display zeigt **RdR** an.
- ➔ Mit [Max.] oder [Min.] zur Ebene **U5r** navigieren und mit Set bestätigen.


- 

5. ▶ Mit *[Min.]* den Parameter auswählen.
- 

6. ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
- 

7. ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.
⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzelschritten.
- 

8. ▶ *[Solltemperatur]* loslassen.
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.
- 

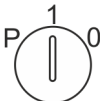
9. ▶ Mit *[Min.]* den nächsten Parameter auswählen.
- 10.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.
- 11.** ▶ Auf den Ebenen L52 und L53 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Geräts vollständig eingegeben ist.
- 


12. ▶ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.
⇒ Die IP-Adresse des Geräts ist eingerichtet.


Subnetzmaske am Gerät einrichten



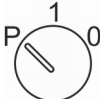

Werkseitig lautet die Subnetzmaske: 255.255.255.0

- 

1. ▶ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
- 2.** ▶ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
- 

3. ▶ *[Max.]* und *[Min.]* gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.
⇒ Das Display zeigt an.
- 

4. ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* zur Ebene navigieren und mit Set bestätigen.
- 

5. ▶ Mit *[Min.]* den Parameter auswählen.
- 

6. ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.



- 7.** Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten Subnetzmaske einstellen.
⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzerschritten.




- 8.** *[Solltemperatur]* loslassen.
⇒ Die ersten drei Stellen der Subnetzmaske sind eingegeben.



- 9.** Mit *[Min.]* den nächsten Parameter **L56** auswählen.

- 10.** *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
⇒ Die nächsten Stellen der Subnetzmaske werden angezeigt.

- 11.** Auf den Ebenen L57 und L58 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die Subnetzmaske vollständig eingegeben ist.

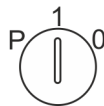


- 12.** Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.
⇒ Die Subnetzmaske ist eingerichtet.

IP-Adresse des Standard-Gateway am Gerät einrichten



Der Standard-Gateway jedes Geräts benötigt eine eigene IP-Adresse, die in Ihrem lokalen Netzwerk noch nicht verwendet wird.

Werksseitig lautet die IP-Adresse des Standard-Gateway: 192.168.0.200

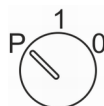

- 1.** Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. Geräteschlüssel auf „P“ stellen.



- 3.** *[Max.]* und *[Min.]* gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.
⇒ Das Display zeigt **RdR** an.



- 4.** Mit *[Max.]* und *[Min.]* zur Ebene **U5r** navigieren und mit Set bestätigen.



- 5.** Mit *[Min.]* den Parameter **L60** auswählen.



- 6.** *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.



- 7.** ▶ Mit *[Max.]* und *[Min.]* die angewählten Stellen der gewünschten IP-Adresse einstellen.
 ⇒ Die Zahl verändert sich in der Anzeige jeweils in Einzelschritten.




- 8.** ▶ *[Solltemperatur]* loslassen.
 ⇒ Die ersten drei Stellen der IP-Adresse sind eingegeben.



- 9.** ▶ Mit *[Min.]* den nächsten Parameter auswählen.

- 10.** ▶ *[Solltemperatur]* gedrückt halten.
 ⇒ Die nächsten Stellen der IP-Adresse werden angezeigt.

- 11.** ▶ Auf den Ebenen L62 und L63 die Schritte 6 bis 10 wiederholen, bis die IP-Adresse des Standard-Gateway vollständig eingegeben ist.

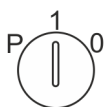

- 12.** ▶ Schüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.
 ⇒ Die IP-Adresse des Standard-Gateway ist eingerichtet.

Gerät mit lokalem Netzwerk verbinden


- Personal: ■ System-/Netzwerkadministrator (empfohlen)
- Materialien: ■ Netzwerkkabel (EIA/TIA-568-Standard), (im Lieferumfang von PC-KIT-NET enthalten)

Voraussetzungen:

- Das TCP/IP-Modul ist installiert (☞ *Kapitel 1.6 „Zusätzliche Gerätekomponenten“ auf Seite 15* und ☞ *„Montage- und Anschlussanleitung – PC-KIT-STICK/PC-KIT-NET“*).
- Die Software KIRSCH-DATANET (Version 5.0 oder höher) ist auf dem lokalen PC oder im lokalen Netzwerk installiert.

- 1.** ▶ Gerät ausschalten ☞ *Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46*.
- 2.** ▶ Netzstecker abziehen.
- 3.** ▶ Staubschutzkappe vom TCP/IP-Ausgang entfernen.
- 4.** ▶ Netzwerkkabel in den TCP/IP-Ausgang stecken.
- 5.** ▶ Netzwerkkabel mit der Netzwerkdose verbinden.
 ⇒ Das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden.
- 6.** ▶ Netzstecker in Steckdose stecken.
- 7.** ▶ Gerät einschalten ☞ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46*.

MAC-Adresse am Gerät auslesen

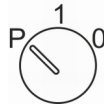

1. ➤ Geräteschlüssel in Schlüsselschalter stecken.
2. ➤ Geräteschlüssel auf „P“ stellen.
3. ➤ [Max.] und [Min.] gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halten.
⇒ Das Display zeigt `Rdr` an.
4. ➤ Mit [Max.] und [Min.] zur Ebene `L5r` navigieren und mit Set bestätigen.


5. ➤ Mit [Min.] den Parameter `L70` auswählen.
⇒ Die ersten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.



Die ersten beiden angezeigten Stellen "00" gehören nicht zur MAC-Adresse.



6. ➤ Mit [Min.] den nächsten Parameter `L71` auswählen.
⇒ Die nächsten Stellen der MAC-Adresse werden angezeigt.
7. ➤ Auf den Ebenen L72 bis L75 Schritt 5 wiederholen, bis die MAC-Adresse vollständig ausgelesen ist.

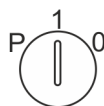

8. ➤ Schlüsselschalter auf „1“ stellen, um die Eingabe zu beenden.
⇒ Die MAC-Adresse ist ausgelesen.

7.7 Gerät beschicken



VORSICHT!

Vor Beschickung die Kühlkette sicherstellen!

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des jeweiligen Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts vor der Beschickung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut vor der Beschickung des Geräts gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.



VORSICHT!

Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.

Während des Betriebs kann das Gerät jederzeit mit Kühlgut beschickt werden.

Wenn bei der Beschickung die Tür des Geräts für länger als 60 Sekunden geöffnet wird, löst der Tür-Offen-Alarm aus [☞ Kapitel 10 „Alarmer“ auf Seite 66](#).

Bei der Beschickung des Geräts Folgendes beachten:

- Sicherstellen, dass das Kühlgut der Zweckbestimmung des Geräts entspricht.
- Sicherstellen, dass kein infiziertes oder verunreinigtes Kühlgut eingelagert wird.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut in geschlossenen Behältern gelagert wird.
- Die maximale Tragkraft der Drahtroste und Schubfächer beachten.
- Vor und während der Beschickung die geltenden Bestimmungen zur persönlichen Hygiene einhalten.
- Vor und während der Beschickung die sich aus der Art des Kühlguts ergebenden Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Gerät beschicken



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch gebrochene Schubfächer oder Roste und herabfallendes Kühlgut nach Überladung!

Die Tragfähigkeit der Roste und Schubfächer ist begrenzt. Wenn die Roste und Schubfächer überladen werden, können sie brechen. An den Bruchstellen besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Herabfallendes Kühlgut kann zu Prellungen führen.

- Die Schubfächer und Roste mit maximal 100 kg/m² beladen (entsprechend DIN 13277).
- Das Kühlgut in bruchsicheren Behältern lagern.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut standsicher aufgestellt ist.

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist in Betrieb genommen und die Solltemperatur ist erreicht.
 - Die Kühlkette des Kühlguts wurde gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers eingehalten.
1. ➔ Gerät mit Kühlgut beschicken.
 2. ➔ Wenn die Tür für mehr als 60 Sekunden offen steht, gegebenenfalls den Tür-Offen-Alarm deaktivieren.



Zur Überprüfung der Temperatur ist ein geeignetes Temperaturmessgerät zu verwenden, z.B. Kirsch Evolution Cloud.

8 Reinigung und Desinfektion

Geeignete Desinfektionsmittel

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Desinfektionsmittel wurden werksseitig durch KIRSCH getestet.

Die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers beachten.



Reinigung für Geräte mit Reinraum-Kit

Wir empfehlen die Erstellung eines Hygieneplans welcher Reinigungsprozeduren gem. DIN 14644 (ISO + GMP) enthält, u.a empfehlen wir eine sporadische Begasung des Reinraumes bei geöffneter Kühlschranktür um alle Innenraumflächen keimfrei zu halten.

Bitte prüfen Sie unbedingt vor der Reinigung, ob die von Ihnen eingesetzten Reinigungsmittel für die genannten Materialien geeignet sind.

Tab. 9: Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel	Hersteller
Incidin liquid	Ecolab Deutschland GmbH
Mikrozid AF liquid	Schülke & Mayr GmbH
Bacillol 30 Foam	Bode Chemie GmbH
Wasserstoffperoxid 6 %	PANREAC QUIMICA S.L.U



Andere Desinfektionsmittel nutzen

Wenn andere als die genannten Desinfektionsmittel verwendet werden, diese vor der ersten Verwendung an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen.

Verwenden Sie nur säurefreie Desinfektionsmittel.

Im Zweifel KIRSCH kontaktieren.

Gerät reinigen und desinfizieren

Schutzausrüstung: ■ Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe



VORSICHT!

Gefahr für das Kühlgut durch Kontamination!

Ein verunreinigtes Gerät kann das gelagerte Kühlgut kontaminieren. Eine Kontamination kann das Kühlgut beschädigen oder zerstören.

- Bereits kontaminiertes Kühlgut nicht im Gerät lagern.
- Nach einer Kontamination das Gerät und das Kühlgut reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung im Betrieb reinigen, desinfizieren und sterilisieren.
- Die geltenden Anforderungen an die persönliche Hygiene, Desinfektion und Sterilisation beachten.



VORSICHT!

Lebensgefahr durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.

Voraussetzungen:

- Das Kühlgut ist umgelagert.
- Das Gerät ist ausgeschaltet ☞ *Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46.*

1. ➤ Schubfächer und Roste entnehmen.



HINWEIS!

Gefahr von Sachschaden an der Elektrik durch ungeeignete Reinigungsmittel!

Im Gerät sind empfindliche elektrische Bauteile verbaut. Wenn die elektrischen Bauteile mit ungeeignetem Reinigungsmittel in Berührung kommen, kann dies zum Funktionsverlust des Geräts führen.

- Sand- und säurefreie Reinigungsmittel verwenden.
- Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel nicht in Kontakt mit elektrischen Bauteilen bringen.

2. ➤ Innenraum mit warmem Wasser reinigen, trocknen und anschließend mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ *„Geeignete Desinfektionsmittel“ auf Seite 58*).

3. ➤ Schubfächer und Roste mit Handspülmittel reinigen, trocknen und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren (☞ *„Geeignete Desinfektionsmittel“ auf Seite 58*).

4. ➤ Schubfächer und Drahtroste wieder einsetzen.

5. ➤ Türdichtung nur mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocken reiben.

6. ➤ Gerät einschalten ☞ *Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.*

Gehäuse reinigen

Lackiertes Gehäuse

➤ Gehäuse mit Lackreinigungs- und Pflegemittel behandeln.

Edelstahl-Gehäuse

➤ Gehäuse mit Edelstahl-Reinigungs- und Pflegemittel behandeln.

9 Wartung

Intervall	Wartungsarbeit
spätestens alle 12 Monate	Bei Geräten mit Reinraum-Kit: Erneuerung des HEPA-Filters ↪ <i>Kapitel 9.3 „HEPA-Filter auswechseln“ auf Seite 64</i>
spätestens alle 24 Monate	Sicherheitstechnische Kontrolle gemäß DGUV-Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) durchführen.
spätestens alle 6 Monate	Verflüssiger prüfen ↪ <i>Kapitel 9.1 „Sicherheitstechnische Kontrolle“ auf Seite 61.</i>



HINWEIS!

Bei Überschreiten einer Verflüssiger Temp. von 60 C ° muss der Filter sofort erneuert werden. Bitte überprüfen Sie in diesem Zuge auch die Funktion des Verdichter-Gebläses. Bei einem Defekt der Verdichterbelüftung steigt die Verflüssigertemperatur an.

9.1 Sicherheitstechnische Kontrolle



Sicherheitstechnische Kontrolle alle 2 Jahre durchführen!

Das Gerät sollte vom Betreiber gemäß DGUV-Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) geprüft werden.

Das Gerät in regelmäßigen Abständen einer sicherheitstechnischen Kontrolle unterziehen, wenigstens jedoch alle zwei Jahre.

Inhalt der sicherheitstechnischen Kontrolle

Die sicherheitstechnische Kontrolle durch den Betreiber beinhaltet folgende Einzelprüfungen und ihre Dokumentation:

1. ➤ Sichtprüfung
2. ➤ Funktionsprüfung
3. ➤ Temperaturprüfung
4. ➤ Temperaturalarmprüfung
5. ➤ Prüfung des Verflüssigers



HINWEIS!

Sollten Zweifel am ordnungsgemäßen Zustand des Geräts bestehen, Gerät sofort aus dem Verkehr nehmen. Um unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern, Gerät entsprechend kennzeichnen. Service verständigen ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

Sichtprüfung

1. ➤ Gesamtes Gerät auf Vollständigkeit, richtigen Aufbau und Beschädigungen prüfen.
2. ➤ Folgende Teile des Geräts im Einzelnen auf Beschädigungen prüfen:
 - Türabdrücker
 - Innenraum
 - Türdichtung
3. ➤ Wenn Beschädigungen vorhanden sind und die Funktionalität nicht gewährleistet ist, Gerät außer Betrieb nehmen und Service verständigen ☞ „Servicekontakt“ auf Seite 4.

Funktion prüfen


- Folgende Teile des Geräts auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen:
- Türabdrücker

Temperatur prüfen

Werkzeug: ■ geeichtes Temperaturmessgerät


1. ➤ Fühler des Messgeräts puffern, um Kühlgut zu simulieren.
2. ➤ Messfühler im Innenraum auf mittlerer Höhe anbringen.
3. ➤ Temperatur nach 120 Minuten ablesen.
4. ➤ Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren ☞ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 58.

Temperaturalarm prüfen

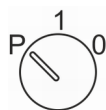

1. ➤ Geräteschlüssel auf Position „P“ drehen.
2. ➤ Tasten [Temperaturwarnung max.] und [Temperaturwarnung min.] gleichzeitig drücken und für ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
 - ⇒ Im Display wird ein blinkender Dezimalpunkt (.) angezeigt.
 - Die Testfunktion startet, die elektronische Verzögerung ist für 10 Minuten ausgeschaltet.
3. ➤ Überwachungsfühler (☞ Kapitel 1.5.7 „Temperaturfühler“ auf Seite 14) anwärmen (beispielweise mit den Fingern).
4. ➤ Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
 - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und die Fehlermeldung an.

5. ➔ Überwachungsfühler abkühlen (beispielsweise mit Kältespray).
6. ➔ Warten, bis Warngrenze überschritten wird und der Summer ertönt.
 - ⇒ Das Display zeigt abwechselnd die aktuelle Temperatur und beide Fehlermeldungen (oberer und unterer Temperaturalarm) an.

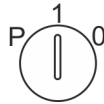

7. ➔ Geräteschlüssel auf Position „1“ drehen.
 - ⇒ Die Testfunktion ist beendet, die elektronische Verzögerung ist wieder eingeschaltet.Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Kühlguts an.



Die Testfunktion wird nach Ablauf von 10 Minuten automatisch beendet.

8. ➔ Gerät nach der Überprüfung reinigen und desinfizieren
↳ Kapitel 8 „Reinigung und Desinfektion“ auf Seite 58.

Verflüssiger prüfen

Den Verflüssiger (Abb. 2) spätestens alle 6 Monate entstauben, um die Leistung der Kältemaschine nicht zu beeinflussen.

Voraussetzung:

- Die Rückseite des Geräts ist zugänglich.
1. ➔ Den Verflüssiger abstauben (beispielsweise mit einer Bürste oder einem Staubsauger).
 2. ➔ Den Verflüssiger auf sichtbare Beschädigungen und Abnutzungen prüfen.

9.2 Akku auswechseln



Bitte beachten Sie, dass der Akku einen unterschiedlichen Einbauort bei unterschiedlichen Modellen hat.

Modell	Einbauort des Akkus
MED 100 PRO-ACTIVE MED 200 PRO-ACTIVE FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	Akku unten im Maschinenraum des Geräts
MED 126 PRO-ACTIVE MED 288 PRO-ACTIVE / ULTIMATE MED 340 PRO-ACTIVE / ULTIMATE MED 468 PRO-ACTIVE / ULTIMATE	Akku oberhalb der Tür im Aufsatz
MED 520 PRO-ACTIVE / ULTIMATE auch CR MED 720 PRO-ACTIVE / ULTIMATE auch CR	Akku oben im Aufsatz neben der Kältemaschine

Akku unten im Maschinenraum des Geräts

1. ► Maschinenraumbhende demontieren.
2. ► Klemmbrett von vorne lösen.
3. ► Klemmbrett nach vorne herausziehen.
4. ► Rote Leitung + abziehen.
5. ► Rote und blaue Leitung vom Akku entfernen.
6. ► Akku aus der Halterung herausziehen.
7. ► Ersatzakku in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Akku oberhalb der Tür im Aufsatz

1. ► Die Abdeckung des Akkufachs öffnen.
2. ► Rote Leitung + abziehen.
3. ► Rote und blaue Leitung vom Akku entfernen.
4. ► Akku aus der Halterung herausziehen.
5. ► Ersatzakku in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Akku oben im Aufsatz neben der Kältemaschine

1. ► Rote Leitung + abziehen.
2. ► Rote und blaue Leitung vom Akku entfernen.
3. ► Akku aus der Halterung herausziehen.
4. ► Ersatzakku in umgekehrter Reihenfolge montieren.

9.3 HEPA-Filter auswechseln



Bei Geräten ohne Kondensatorüberwachungssystem empfehlen wir, den HEPA-Filter alle 12 Monate auszu-tauschen.



Bei Geräten, die mit einem Kondensatorüberwachungssystem ausgestattet sind, empfehlen wir, den Filter auszutauschen, wenn die Kondensatortemperatur + 60 °C erreicht.

- 1.** ➤ Lösen Sie das Gehäuse vom HEPA-FILTER.
- 2.** ➤ Entnehmen Sie den alten HEPA-Filter.
- 3.** ➤ Setzen Sie den neuen HEPA-Filter ein.
 - ⇒ HEPA-Filter von oben einsetzen.



*Die Dichtung muss am Gehäuse anliegen.
Etikett nach oben!*

- 4.** ➤ Befestigen Sie das Gehäuse vom HEPA-Filter.



Ziehen Sie alle Schrauben fest an.

- 5.** ➤ Dichten Sie das Filtergehäuse mit Reinraumsilikon ab.

10 Alarme

10.1 Alarmfunktionen

Alarmfunktionen

Wenn eine Funktion des Geräts fehlerhaft oder defekt ist, wird ein Alarm ausgelöst.

Jeder Alarm wird sowohl optisch als auch akustisch angezeigt.

Das Display zeigt abwechselnd den optischen Alarm und die Temperatur an. Die Meldung wird so lange angezeigt, bis der Alarm quittiert wird. Das Quittieren des Alarms behebt den Fehler nicht.

Der akustische Alarm wird als Alarmton (im Folgenden „Summer“) ausgegeben.

Das Gerät verfügt über folgende Alarmfunktionen:




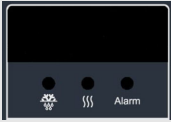
- Temperaturalarm
- Tür-Offen-Alarm
- Stromausfallwarnung
- Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit

Abhängig von der Ursache des ausgelösten Alarms sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- 1 - Summer deaktivieren ↪ „Summer deaktivieren“ auf Seite 67
- 2 - Alarm quittieren ↪ „Alarm quittieren“ auf Seite 68
- 3 - Service informieren ↪ „Servicekontakt“ auf Seite 4

Tab. 10: Alarmfunktionen (Übersicht)

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Temperaturalarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Temperaturwarngrenze wurden überschritten. ■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Summer deaktivieren. ■ Ursache ermitteln und beheben.
		✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Temperaturwarngrenze wurden unterschritten. ■ Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst. 	
Tür-Offen-Warnung		✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet. ■ Der Tür-Offen-Warnung wird nicht über den Fernwarnkontakt weitergeleitet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Summer deaktivieren. ■ Tür schließen.

Alarmfunktion	Display	Summer	Ursache	Maßnahmen
Tür-Offen-Alarm		✓	<ul style="list-style-type: none"> Die Tür ist länger als 180 Sekunden geöffnet. Der Tür-Offen-Alarm wird über den Fernwarnkontakt weitergeleitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Summer deaktivieren. Tür schließen.
Stromausfallwarnung		✓	<ul style="list-style-type: none"> Die Stromversorgung des Geräts ist ausgefallen. Der Fernwarnkontakt hat ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> Summer deaktivieren. Ursache für den Stromausfall ermitteln und beheben. Die Überwachungseinheit bleibt für ca. 30 Stunden in Betrieb. Alarm quittieren.
Alarm bei defektem Akku		✓	<ul style="list-style-type: none"> Die Stromversorgung der Temperaturdokumentation ist ausgefallen. Die Alarmfunktion ist ausgefallen. 	<ul style="list-style-type: none"> Alarm ausschalten. Durch Quittierung ist der akustische Alarm für 48 Std. stummgeschaltet. neuen Akku bestellen, Art.-Nr. 202067 Akku tauschen ↪ <i>Kapitel 9.2 „Akku auswechseln“ auf Seite 63.</i>
Alarm bei defekter Anzeige- und Bedieneinheit	PRO-ACTIVE  ULTIMATE Display bleibt dunkel	✓	<ul style="list-style-type: none"> Die Anzeige- und Bedieneinheit ist defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> Netzstecker ziehen. Service informieren ↪ <i>„Servicekontakt“ auf Seite 4.</i>

10.2 Umgang mit Alarmen

Summer deaktivieren

Der Summer ertönt.



- Taste *[Reset]* drücken.
⇒ Der Summer ist deaktiviert.
- Ursache des Alarms ermitteln und beheben.

Andernfalls ertönt der Summer nach jeweils 30 Minuten erneut.

Alarm quittieren

Der Summer ist deaktiviert, die Alarmursache behoben, aber der Alarm wird weiterhin auf dem Display angezeigt.



→ Taste *[Reset]* drücken.

⇒ Der Alarm ist quittiert. Das Display zeigt die Temperatur des Kühlguts an.

11 Statusanzeigen und Fehlermeldungen




11.1 Statusanzeigen

Statusanzeigen sind Hinweise zur Information des Anwenders (beispielsweise auf eine laufende Abtauung).

Bei einer Statusanzeige erfolgt kein akustisches Signal (im Folgenden „Summer“).

Eine Statusanzeige erfordert keine unmittelbare Aktion durch den Anwender.

Tab. 11: Statusanzeigen

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme	Geräte-schlüssel
	–	LED-Anzeige [Abtauung] leuchtet: ■ Der Abtauvorgang ist aktiv.	–	–
	–	LED-Anzeige [Alarm] leuchtet: ■ Ein oder mehrere Alarme wurden ausgelöst (Sammelalarm).	–	–
	–	Standby-Anzeige: ■ Das Gerät ist am Strom angeschlossen und der Schlüsselschalter steht auf Position „0“.	■ Schlüsselschalter auf Position „1“ drehen, um das Gerät einzuschalten.	✓

11.2 Fehlermeldungen

Nicht selbst reparieren



WARNUNG!

Gefahr durch unsachgemäße Reparatur oder Änderungen!

Durch unsachgemäße Reparaturen und Änderungen können erhebliche Personenschäden (z. B. Stromschläge) oder Sachschäden (z. B. Feuer, Schäden am Kühlgut) entstehen.

- Reparaturen durch den Service durchführen lassen.
- Ersatzteile von KIRSCH verwenden.
- Keine eigenmächtigen An- und Umbauten am Gerät vornehmen.
- Im Zweifelsfall KIRSCH kontaktieren.

Kühlgut umlagern



HINWEIS!

Gefahr für das Kühlgut durch ein defektes oder gestörtes Gerät!

Durch einen Defekt oder eine Störung des Geräts ist die Kühlleistung nicht mehr gewährleistet. Verminderte Kühlleistung kann zu erheblichen Schäden am Kühlgut führen.

- Alternativen Lagerort für das Kühlgut wählen.
- Betriebs- und Lagerbedingungen sicherstellen.
- Kühlgut umlagern.

Auftreten von Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zeigen eine Fehlfunktion des Geräts an.

Fehlermeldungen erscheinen abwechselnd zur Temperaturanzeige auf dem Display.

Bei mehr als einem Fehler werden die Fehler nacheinander auf dem Display angezeigt.

Zusätzlich zur Anzeige auf dem Display ertönt der Summer, der den Fehler meldet.

Das Gerät zeigt folgende Fehler optisch und akustisch an:

- Gerätefehler
- Softwarefehler

Bei auftretenden Fehlermeldungen vorgehen wie im Folgenden beschrieben:

Vorgehensweise bei Fehlermeldungen

1. ▶ Summer deaktivieren.
2. ▶ Fehleranzeige gemäß Tabelle (↗ Kapitel 11 „Statusanzeigen und Fehlermeldungen“ auf Seite 69) bewerten.
3. ▶ Empfohlene Maßnahmen durchführen.
4. ▶ Alarmmeldung quittieren.



HINWEIS!

Für Reparaturen den Service verständigen:

Folgende Firma ist durch KIRSCH mit dem Service für das Gerät beauftragt und autorisiert: ☞ „Servicekontakt“ auf Seite 4



VORSICHT!

Lebensgefahr durch unterbrochene Kühlkette bei Umlagerung!

Das Gerät dient der gewerblichen Lagerung von kühlpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der jeweiligen Angabe des Herstellers. Wenn die Kühlkette des Kühlguts durch die Umlagerung unterbrochen wird, sind die vorgeschriebenen Lagerbedingungen nicht mehr erfüllt.

- Kühlgut bei Umlagerung nicht dem Licht aussetzen.
- Kühlgut bei Umlagerung nicht in Heizkörpernähe ablegen.
- Sicherstellen, dass das Kühlgut im Ersatzgerät gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers gelagert wird.






HINWEIS!

Bedeutung von "X" für Fehler- und Statusmeldungen

X wird nicht im Display angezeigt.


- Stattdessen steht dort eine Ziffer, die das entsprechende Bauteil bezeichnet.

Tab. 12: Fehlermeldungen des Geräts







Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	Fühler X: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fehler oder Kurzschluss des entsprechenden Fühlers. ■ Der Kälteregele arbeitet im Notprogramm. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Service verständigen.
	✓	Fühler X: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fehler oder Bruch des entsprechenden Fühlers. ■ Kälteregele arbeitet im Notprogramm. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Service verständigen.
	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Defekt des Akkuverbindungskabels. ■ Akkuüberwachung ist nicht gewährleistet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Service verständigen.

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
LXL	✓	<p>Lüfter X:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu gering. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
LXH	✓	<p>Lüfter X:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahl des entsprechenden Lüfters zu hoch. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
FAI	✓	<p>Lüfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lüfter erreicht nach Geräteeustart nicht die erforderliche Mindestdrehzahl. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
dFA	✓	<p>Lüfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drehzahlen der Lüfter weichen zu stark voneinander ab. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
r0IL	✓	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gemessene Stromaufnahme der Kältemaschine zu niedrig. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
r0IH	✓	<p>Relais X:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gemessene Stromaufnahme der Kältemaschine zu hoch. ■ Die Temperatur des Kühlguts kann schwanken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
PRr	✓	<p>Synchronisationsfehler:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis. ■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers. 	<p>PRO-ACTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schlüsselschalter auf 0 stellen. ■ Netzstecker ziehen und wieder einschalten ↪ Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46. <p>ULTIMATE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Herunterfahren ↪ Kapitel 7.2 „Gerät ausschalten“ auf Seite 46 ■ Netzstecker ziehen und wieder einschalten ↪ Kapitel 7.1 „Gerät einschalten“ auf Seite 46.

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
Con	✓	Verbindungsproblem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Synchronisationsfehler zwischen Bedienteil und Überwachungskreis. ■ Keine gesicherte Funktion des Kühlreglers. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kühlgut umlagern. ■ Service verständigen.
IEC	✓	Steuerungsfehler: <ul style="list-style-type: none"> ■ Fehler bei Selbsttest im Kühlregler. ■ Der Überwachungskreis übernimmt die Temperaturkontrolle. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Service verständigen.
door	✓	Tür-Offen-Warnung: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tür ist länger als 60 Sekunden geöffnet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tür schließen.
door	✓	Tür-Offen-Alarm: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tür ist länger als 180 Sekunden geöffnet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tür schließen.
bAtt	✓	Akku defekt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Akku muss getauscht werden. ■ Die Temperaturdokumentation und Alarmierung bei Stromausfall fällt aus. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarm ausschalten. Durch Quittierung ist der akustische Alarm für 48 Std. stummgeschaltet. ■ neuen Akku bestellen, Art.-Nr.: 202067 ■ Akku tauschen ↪ Kapitel 9.2 „Akku auswechseln“ auf Seite 63.
PF	✓	Stromausfall: <ul style="list-style-type: none"> ■ Gerät kühlt nicht. ■ Alarm ist aktiv. ■ Der Fernwarnkontakt wird ausgelöst. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stromversorgung überprüfen.
EH1	✓	Temperaturalarm (hoch): <ul style="list-style-type: none"> ■ Die obere Temperaturwarngrenze ist erreicht oder überschritten (beispielsweise durch sehr warmes Kühlgut oder zu lange geöffnete Tür). <p>Die Displayanzeige (Mittelwert) kann jedoch noch unter der Temperaturwarngrenze sein. Im Display wird im Wechsel der Mittelwert und die Temperatur am wärmsten Punkt angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperaturwarngrenze abrufen und prüfen ↪ Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 43. ■ Falls nötig, Werte der Temperaturwarngrenzen korrigieren. ■ Temperaturverlauf beobachten. ■ Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verständigen. ■ Kühlgut umlagern.

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	✓	<p>Temperaturalarm (tief)</p> <ul style="list-style-type: none"> Die untere Temperaturwarngrenze ist erreicht oder überschritten (beispielsweise nach längerem Öffnen der Tür, wenn die Kältemaschine das Gerät herunterkühlt). Die Displayanzeige (Mittelwert) kann jedoch noch über der Temperaturwarngrenze sein. Im Display wird im Wechsel der Mittelwert und die Temperatur am kältesten Punkt angezeigt. Sicherheitseinrichtung spricht an, Überwachungskreis hat Kältemaschine abgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturwarngrenze abrufen und prüfen ↪ <i>Kapitel 6.2.2.2 „Temperaturwarngrenzen anzeigen und ändern“ auf Seite 43.</i> Falls nötig, Werte der Temperaturwarngrenzen korrigieren. Temperaturverlauf beobachten. Falls keine Normalisierung eintritt, den Service verständigen. Kühlgut umlagern.

Tab. 13: Fehlermeldungen und Statusanzeigen des PC-KIT-STICK

Display	Summer	Beschreibung	Maßnahme
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopiervorgang läuft. XX steht für den prozentualen Fortschritt des Kopiervorgangs. 	<ul style="list-style-type: none"> USB-Stick nicht entfernen.
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kopiervorgang ist abgeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> USB-Stick entfernen.
	–	<p>Statusanzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Speicher des USB-Sticks ist voll. 	<ul style="list-style-type: none"> USB-Stick mit ausreichend Speicherkapazität verwenden.
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> USB-Stick-Fehler beim Zugriff auf Dateisystem bzw. Fehler beim Initialisieren des Dateisystems. 	<ul style="list-style-type: none"> Bitte anderen Stick verwenden
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Datenauslesung fehlgeschlagen, Neuinitialisierung notwendig. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerät über Schlüsselschalter ausschalten, dann Gerät für 1 Minute vom Netz trennen. Im Anschluss Gerät wieder in Betrieb nehmen und Datenauslesung starten.
	–	<p>Fehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> USB-Stick wurde im laufenden Kopiervorgang entfernt. 	<ul style="list-style-type: none"> USB-Stick entfernen und nach 1 Minute erneut versuchen.

12 Außerbetriebnahme und Entsorgung

12.1 Gerät außer Betrieb nehmen

Außerbetriebnahme

1. ➤ Gerät ausschalten.
2. ➤ Kühlgut umlagern.
3. ➤ Netzstecker ziehen.
4. ➤ Anschlusskabel durchtrennen.
5. ➤ Schlösser entfernen oder zerstören.
6. ➤ Tür abmontieren.

12.2 Gerät entsorgen

Akku entsorgen



UMWELT!

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Akkus!

Wenn der Akku einzeln entsorgt wird, wie folgt vorgehen:

- Akku nicht beschädigen, verbrennen oder kurzschließen.
- Den Akku entsprechend den regionalen Vorschriften entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

Gerät entsorgen

Gerät entsorgen



UMWELT!

Gefahr für die Umwelt durch falsche Entsorgung des Geräts!

Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, können erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.

- Die Kältemaschine nicht selbstständig ausbauen und entsorgen.
- Wenn umweltgefährdende Stoffe (beispielsweise Kältemittel) versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde über den Schaden informieren und geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen.
- Das Gerät entsprechend den regionalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen.
- Im Zweifel Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung bei der örtlichen Kommunalbehörde oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben einholen.

13 Anhang

Im Anhang befinden sich je nach Modell folgende mitgeltende Dokumente:

- Konformitätserklärung
- Technische Daten
- Einbauzeichnung

13.1 Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung



Wir,

Philipp Kirsch GmbH
 Im Lossenfeld 14
 77731 Willstätt-Sand
 Deutschland

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebenen Produkte zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die Schutzanforderungen der unten genannten Richtlinien und Normen einhalten.

Fabrikat	Geräteart	Typ	Fabriknummern ab Fabrik-Nr.
KIRSCH	Kühlschrank	MED 100 PRO-ACTIVE*	100 30 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 126 PRO-ACTIVE*	125 33 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 200 PRO-ACTIVE*	200 30 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 PRO-ACTIVE*	280 30 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 PRO-ACTIVE*	330 30 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 PRO-ACTIVE*	460 30 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 PRO-ACTIVE*	500 31 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 CR PRO-ACTIVE*	500 43 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 PRO-ACTIVE*	700 39 35000
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 01 25309
KIRSCH	Gefrierschrank	FROSTER MED 95 PRO-ACTIVE	095 30 26096
KIRSCH	Kühlschrank	MED 288 ULTIMATE*	280 71 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 340 ULTIMATE*	340 71 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 468 ULTIMATE*	460 71 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 ULTIMATE*	500 71 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 ULTIMATE*	700 71 35000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 520 CR-HF PRO-ACTIVE*	500 46 25000
KIRSCH	Kühlschrank	MED 720 CR-HF PRO-ACTIVE*	700 41 25000

Richtlinien:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Harmonisierte Normen:

DIN EN 61010-1:2020-03
 DIN EN IEC 61010-2-011:2023-05
 DIN EN 60601-1-2:2022-01
 DIN EN IEC 61000-3-2:2023-10
 DIN EN IEC 61000-3-3:2023-02

Normen:

DIN EN ISO 9001:2015-11
 *DIN 13277:2022-05



Willstätt, 05.02.2025
 Dr. Jochen Kopitzke
 Geschäftsführer



13.2 Technische Daten

	FR MED 95 PRO-ACTIVE	MED 100 PRO-ACTIVE	MED 126 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE	MED 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Kühlinhalt in Liter	95	95	120	170	280
Temperatureinstellung ca. in °C	-5 bis -25	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50	50/60	50/60	50/60	50/60
Kältemittelmenge in Gramm	42	43	32	37	27
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Stromaufnahme in Ampere	0,54	0,48	0,50	0,48	0,63
Leistungsaufnahme in Watt	123	30	105	30	38,7
Normalverbrauch in kWh/24	1,33	0,43	0,58	0,53	0,59
Zul. Umgebungstemperatur in °C	+10 bis +32	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38
Angabe des Temperaturanstiegs im Inneren bei Netzausfall in Minuten bei 25°C Umgebungstemperatur	106	95	71	145	99
Temperaturhomogenität bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K	**	1,78	**	1,33	1,58
Temperaturkonstanz bei Referenzumgebungstemperatur von 25°C in K	**	0,33	**	0,37	0,72
Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm	54 x 54 x 82	54 x 54 x 82	54 x 53,5 x 89	54 x 54,5 x 122	67 x 72 x 132
Nutzungsmaß (BxTxH) in cm	43 x 36 x 34	40,8 x 32 x 34	40,8 x 32 x 59 (Nutztiefe unten 15 cm geringer)	38 x 34 x 72	50,4 x 32 x 92 (Nutztiefe unten 15 cm geringer)

	FR MED 95 PRO-ACTIVE	MED 100 PRO-ACTIVE	MED 126 PRO-ACTIVE	MED 200 PRO-ACTIVE	MED 288 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm	54 x 105,5	54 x 105,5	54 x 106	54 x 105,5	67 x 130
Rostgröße (BxT) in cm	43,8 x 32	43 x 33	44x 24	35 x 40	-
Lichtes Schub- fachmaß (BxTxH) in cm	40,8 x 32 x 5,6	40,8 x 32 x 5,6	41 x 32 x 6	38 x 34 x 5,6	50 x 32 x 5,6
Max. Belastung Schubfach/Rost in kg	13 / 25	13 / 25	13 / 25	13 / 25	16 / 40
Gewicht netto/brutto in kg	50/59	47/56	49/58	69 / 80	75/87
Geräuschemission in dB(A)	38	44,11	38	48,75	41

	MED 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 520 CR/ PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Kühlinhalt in Liter	330	460	500	700
Temperatureinstellung ca. in °C	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15	+2 bis +15
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
Kältemittelmenge in Gramm	75	80	55	55
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Leistungsaufnahme in Watt	40	0,58	66	60
Stromaufnahme in Ampere	0,89	1,48	1,68	1,58
Normalverbrauch in kWh/24	0,51	0,51	0,82	0,85
Zul. Umgebungstemperatur in °C	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38	+10 bis +38
Angabe des Temperaturanstiegs im Inneren bei Netzausfall in Minuten bei 25°C Umgebungstemperatur	115	114	159	121
Temperaturhomogenität bei Refe- renzumgebungstemperatur von 25°C in K	2,81	1,90	1,07	1,52

	MED 340 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 468 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 520 CR/ PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*	MED 720 PRO-ACTIVE/ ULTIMATE*
Temperaturkonstanz bei Referen- z Umgebungstemperatur von 25°C in K	0,46	0,24	0,39	0,35
Außenmaße einschl. Wandabstand (BxTxH) in cm	67 x 66 x 189	74 x 77,5 x 189	77 x 76 x 195,5	77 x 98 x 195,5
Nutzungsmaße (BxTxH) in cm	50,4 x 32 x 116	57,3 x 43 x 116	57,3 x 39 x 129	56,3 x 59,5 x 129
Außenmaße bei 90° geöffneter Tür (BxT) in cm	67 x 124	74 x 142	77 x 144	77 x 165
Rostgröße (BxT) in cm	-	-	-	-
Lichtes Schubfachmaß (BxTxH) in cm	50,4 x 32 x 5,6	57,3 x 43 x 5,6	57,3 x 39 x 5,6	56,3 x 59,5 x 5,6
Max. Belastung Schubfach/Rost in kg	16 / 40	24 / 40	24 / 40	24 / 40
Gewicht netto/brutto in kg	100 / 114	132 / 146	145 / 168	164 / 190
Geräuschemission in dB(A)	39	40	42	42

13.3 Einbauzeichnung

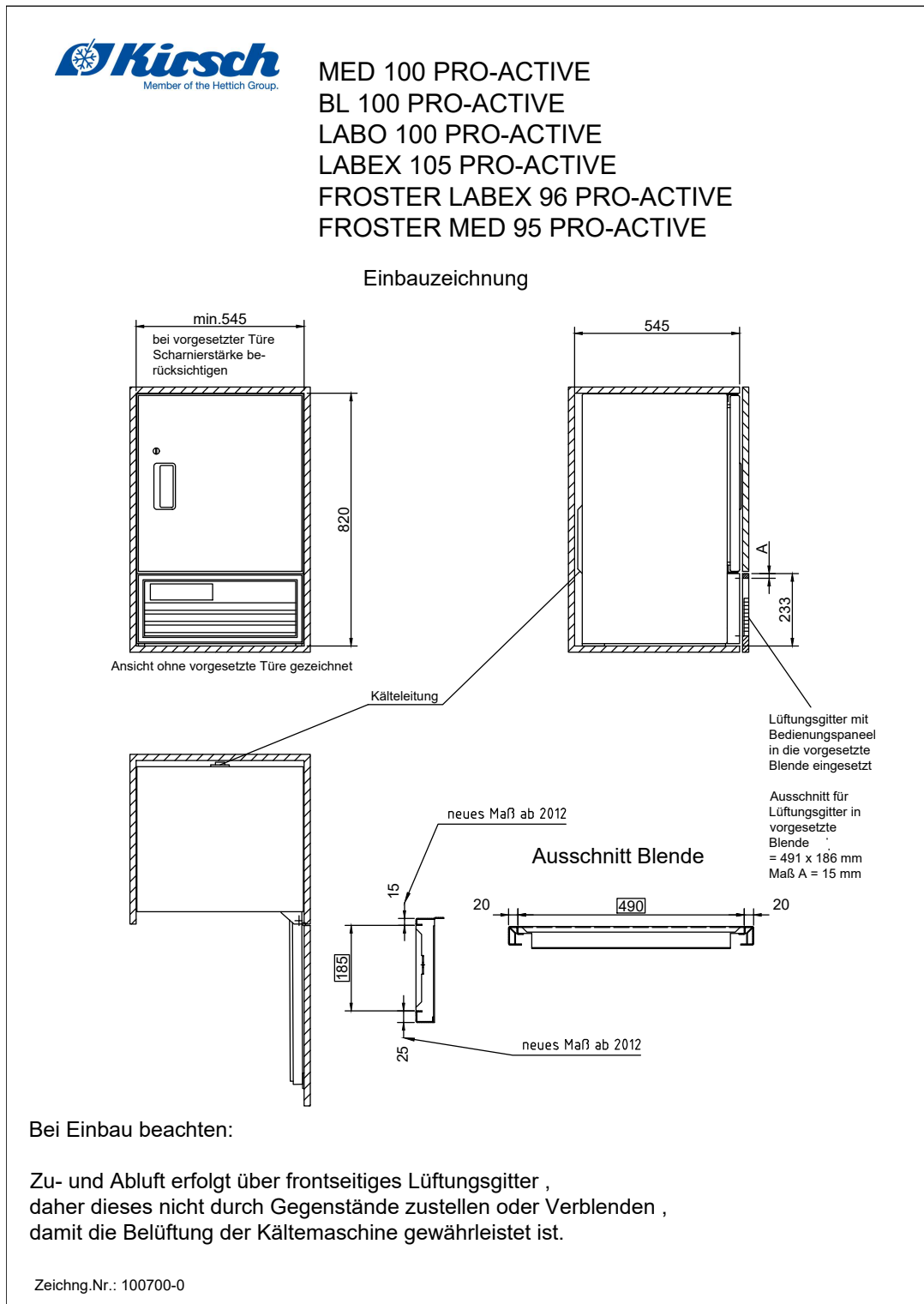


Abb. 7: Einbauzeichnung MED 100 PRO-ACTIVE

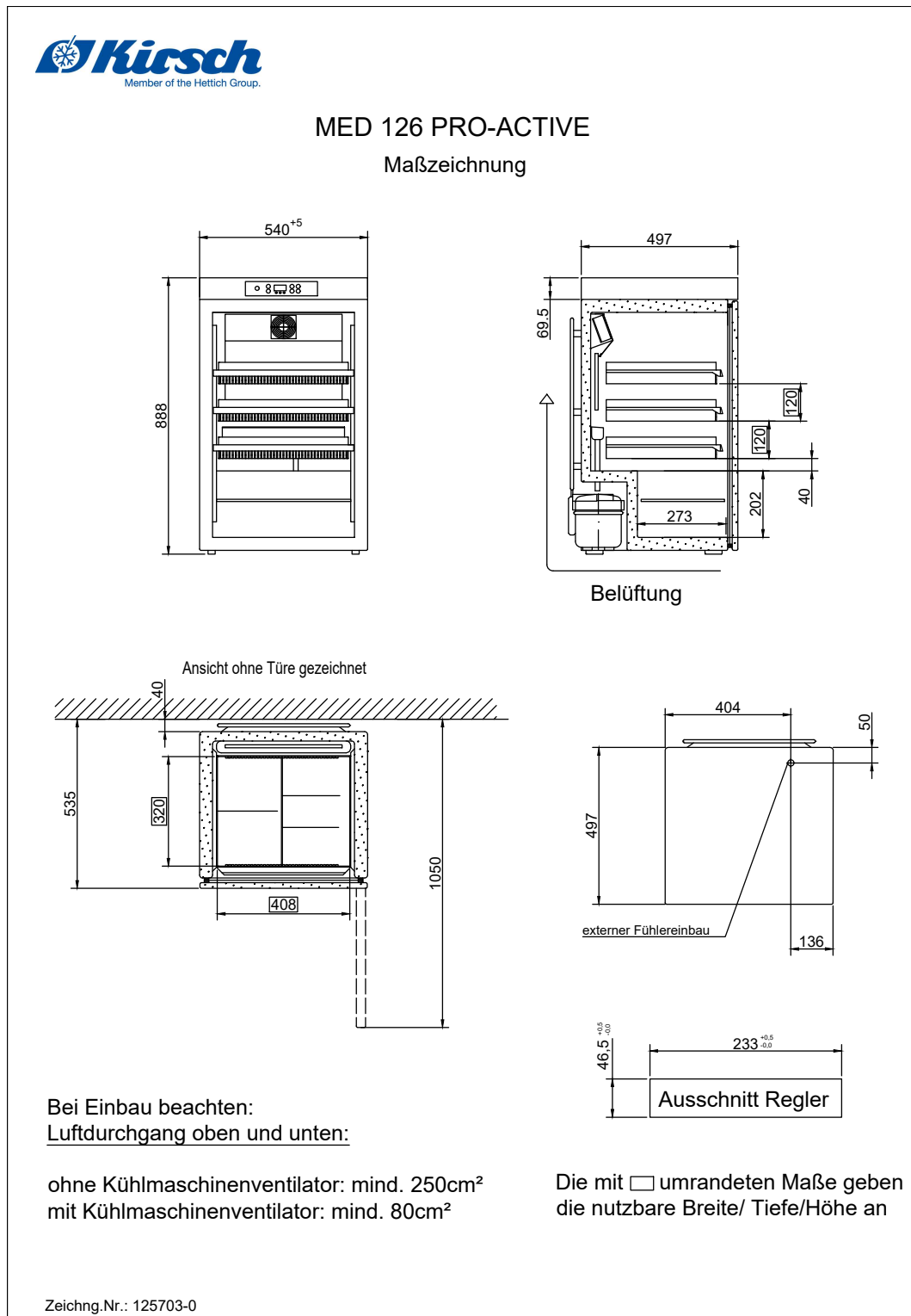


Abb. 8: Einbauzeichnung MED 126 PRO-ACTIVE

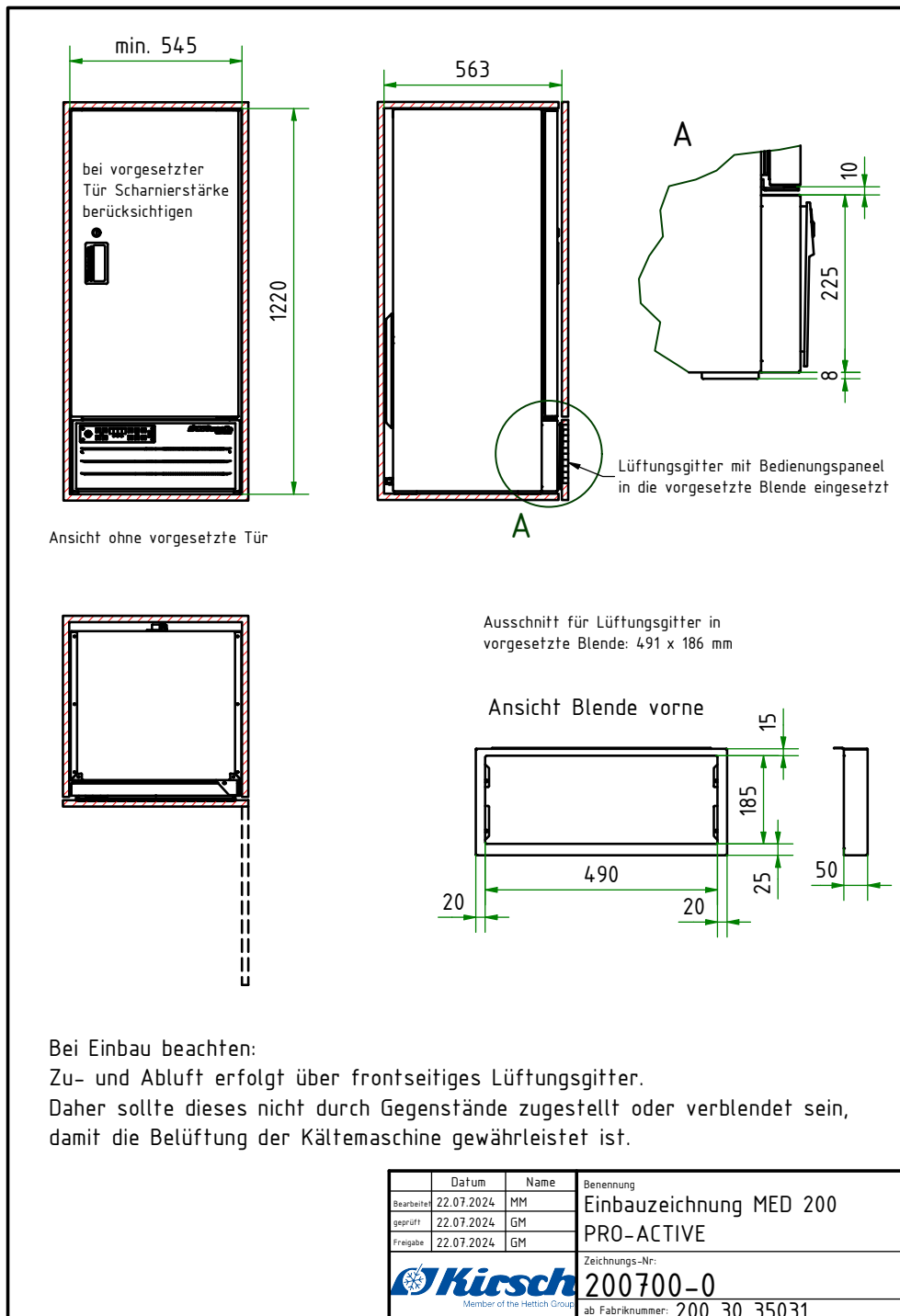


Abb. 9: Einbauzeichnung MED 200 PRO-ACTIVE

14 Index

A

Abtauung (automatisch)	13
Abtauung (manuell)	13
Akku	15
Akku auswechseln	63
Alarmfunktionen	
Alarmer (Übersicht)	66
Übersicht	66
Anhang	77
Anschluss	37
Anzeige	8
Anzeigen am Display (Übersicht)	9
Aufbau	36
Aufbewahrung	3
Aufstellbedingungen	36
Ausschalten	46
Außerbetriebnahme	75

B

Bedienung	8
Ausschalten	46
Einschalten	46
PC-KIT-NET einrichten	51
Superfrost-Funktion	47
Temperaturspeicher abrufen/löschen	47

C

Cyber-Sicherheit	27
------------------------	----

D

Datenauslesung	48
Datenschutz	27
Desinfektion	59
Desinfektionsmittel	58

E

Einbau	37
Einbauzeichnung	82
Einschalten	46
Entsorgung	75

F

Fehlermeldungen (Übersicht)	70
Funktionsprüfung	62

G

Gerätefunktion	
Datenspeicherung	21
Kommunikation	21
Geräteschlüssel	10
Gerätetür	10
Glastür (optional)	19

H

Herstelleradresse	4
-------------------------	---

I

Inbetriebnahme	
Ablauf	39
Personalqualifikation	39
Programmierung	39
Innenausstattung	10

K

Kältemaschine	12
Konformitätserklärung	78
Kontakt	4
Kühlung	12
Kundendienst	4

L

LAN-Schnittstelle	11
Luftfeuchtigkeit	45

M

Mitgeltende Dokumente	77
-----------------------------	----

N

Netzwerkkabel anschließen	37
---------------------------------	----

P

PC-KIT-NET	11, 51
------------------	--------

Personal	30	Temperaturwarngrenzen (Übersicht)	43
Potentialfreier Kontakt	11, 37	ändern	44
R		anzeigen	43
Reinigung		Transport	33
Gehäuse	60	Türschlüssel	10
Innenraum	59	Typenschild	29
Reinraum	19	U	
Filter tausch	64	Über diese Gebrauchsanweisung	3
Reparatur		Umluftkühlung	12
Akku	63	USB	
Restrisiken	25	Datenimport	49
RFID	10	USB-Port	8, 11
Roste	10	V	
S		Verflüssiger	12
Schlüsselschalter	8	Verflüssiger prüfen	63
Schnittstellen	11	Vorhersehbarer Fehlgebrauch	24
Schubfächer	10	W	
Schutzrüstung	31	Wartung	61
Schutzhandschuhe	32	Reinraum	61
Service	4	Wiederinbetriebnahme	34
Sicherheit	23	Z	
Sicherheitstechnische Kontrolle	61	Zeichen	24
Sichtprüfung	62	Zusatzabtauung	13
Solltemperatur	40	Zweckbestimmung	24
Standortänderung	33		
Statusanzeigen (Übersicht)	69		
Stilllegung	34		
Symbole	23		
T			
Tastenfunktionen (Übersicht)	9		
TCP/IP-Modul	11, 51		
Technische Daten	79		
Temperaturalarmprüfung	62		
Temperaturanzeige	13		
Temperaturfühler (Übersicht)	14		
Temperaturprüfung	62		
Temperaturspeicher	13		