



DE



Marie
Founder My Add On

HELLO!

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage!



ACHTUNG!

MySleeve noch
NICHT ausrollen!



Achten Sie auf Ihre Finger!




Die Magneten in den Hülsen sind stark! Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht dazwischengeraten!

www.myaddon.be/mysleeve/montage


MONTAGE & VIDEO



Stellen Sie sicher, dass der Griff **sauber** und **trocken** ist!

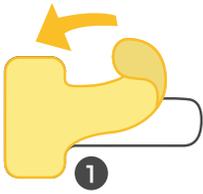


1 Entfernen Sie das Papier vom **Gel Patch**

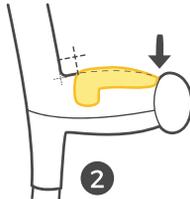

2 Positionieren Sie das **Gel Patch** wie angegeben

3 PRÜFEN

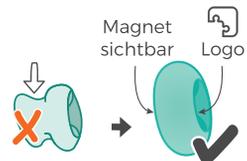


Versichern Sie sich, dass der **MySleeve** so weit wie möglich aufgerollt ist!




Legen Sie die Krücke **zwischen Ihre Knie** und blockieren Sie das Ende der Krücke mit Ihrem Fuß

ODER klemmen Sie die Krücke zwischen beide Füße


TIPP!

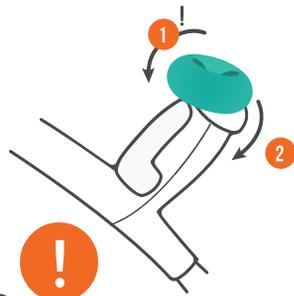


4 Rollen Sie **zuerst** die **MySleeve-Oberseite** über das dicke obere Stück und dann die Unterseite über das untere Stück des Griffs

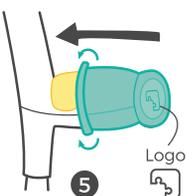

5 Rollen Sie den MySleeve ganz über den Griff ab, damit das Logo sichtbar ist

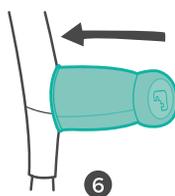

6 Ziehen Sie den MySleeve vorsichtig zurück, bis alles gut sitzt

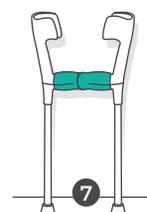

7 Wiederholen Sie dies für die zweite Krücke 👉


HOPPLA, SCHIEFGEANGEN! WAS NUN?

Erkennen Sie eine dieser Situationen?




A Meine Krücke hat eine Aussparung vorne!

Kein Problem, bitten Sie im Geschäft um einen neuen Reflektor oder befestigen Sie an dieser Stelle ein Stück harten Karton. So vermeiden Sie, dass der Magnet in die Aussparung rutscht.

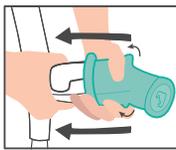

B Das Vorderteil hängt lose über dem Handgriff!

Massieren Sie den MySleeve sanft zurück, bis er gut sitzt und sich überall festzieht. Funktioniert nicht? Rollen Sie den MySleeve vorsichtig mit den Fingerspitzen vom Handriff ab und beginnen Sie erneut (siehe blauer Streifen unten).

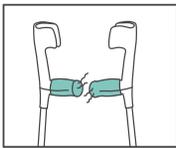


C Die Magneten stoßen einander ab!

Rollen Sie einen MySleeve wieder vorsichtig vom Handriff ab (siehe unten), entfernen Sie den Magneten daraus, **drehen Sie den Magneten** um und legen Sie ihn wieder an die dafür vorgesehene Position. Bringen Sie den MySleeve wieder wie oben beschrieben an.

MYSLEEVE ERNEUT ANBRINGEN?


Zur **reibungslosen Montage** rollen Sie den MySleeve zunächst wieder in Form einer **Rolle** zurück.

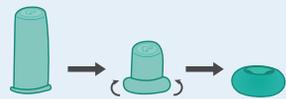

1 Drücken Sie die Öffnung des Sleeves mit den **Zeigefingern** (kräftig!) nach außen.

2 Drücken Sie mit den **Daumen auf den Rand** und **rollen** Sie ihn vollständig bis nach unten.

! **Rollen! NICHT falten!**  

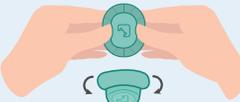

3 Schieben Sie die Oberseite des MySleeve durch den Ring, bis die Rolle so aussieht: 



Ist doch etwas schiefgegangen?

Hat sich die Rolle umgedreht? **Rollen** Sie dann den MySleeve **weiter**, bis er automatisch in die **Ausgangsposition** kommt 

Magneten herausgeschoben? Keine Sorge, stecken Sie ihn wieder in das Magnetfach, nachdem Sie den MySleeve aufgerollt haben.

VOR GEBRAUCH LESEN

Um die Krücken voneinander zu trennen, ziehen Sie sie nicht in einer geraden Linie auseinander, sondern drehen Sie beide in einer Vierteldrehung seitwärts. Achtung! Die MySleeves sind aus Silikon gefertigt. Wenn sie mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, kann das Silikon reißen. Ersetzen Sie in diesem Fall die MySleeves durch ein neues Paar. Wenn Sie Handorthesen aus Metall tragen, verwenden Sie bitte einen Schutz darüber, um ein Einreißen der MySleeves zu verhindern. Anhaftender Staub kann leicht weggeblasen werden. Der Silikon-MySleeve ist hautfreundlich, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass allergische Reaktionen auftreten. Bitte entfernen Sie die MySleeves dann von der Krücke und informieren Sie uns! Wenn der MySleeve einen Reflektor oder eine Lichtquelle auf der Krücke bedeckt, befestigen Sie einen Reflektor oder eine Lichtquelle an einer anderen sichtbaren Stelle auf der Krücke. Die Sleeves können in der Spülmaschine gereinigt werden, nachdem die Magneten zuvor entfernt wurden. Achtung: Das Gelpatch darf nicht gereinigt werden, damit die Hafteigenschaften erhalten bleiben. Gelpatches und Magneten gehören nicht in die Spülmaschine / Waschmaschine. Legen Sie keine der Komponenten in die Mikrowelle oder Waschmaschine. Nicht mit aggressiven Putzmitteln reinigen. Falls die MySleeves vom Griff zu rutschen drohen, folgen Sie Schritt 3 des Montageplans. MySleeves sind nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher. Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich durch die Magneten der MySleeves nicht an den Händen verletzen. Damit das Gelpatch auf dem Griff haften bleibt, sorgen Sie dafür, dass es nicht mit Staub in Berührung kommt. Das maximale Gewicht des Benutzers beträgt 130 kg. MySleeves sind nur für den Einsatz an Griffen medizinischer Krücken bestimmt. Verwenden Sie sie niemals für andere Zwecke! Nicht zur Einnahme bestimmt. Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie alle MySleeves-Einzelteile von Kindern und Tieren fern. Halten Sie die Magneten fern von elektronischen Geräten, Bankkarten und Mobiltelefonen. Achten Sie auf eine eventuelle Rutschgefahr, wenn die MySleeves feucht sind. Die MySleeves bei einer Mindesttemperatur von -5°C und einer maximalen Temperatur von 60°C aufbewahren. Nicht geeignet für Kinderkrücken, ergonomische Krücken oder Krücken, bei denen Gel oder Mousse bereits integriert ist. Der MySleeve passt auf folgende Modelle: Invacare®Advantik® P2804, Herdegen®Evolution, Thuasne®Homecare Elbow Crutch Comfort. Wenn Sie eine Krücke eines anderen Modells haben, kann nicht garantiert werden, dass der MySleeve die vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Es wird empfohlen, die MySleeves nach vier bis sechs Monaten zu ersetzen. Wenn Sie dazu irgendwelche Fragen oder Probleme mit der Montage haben, können Sie sich immer an das Geschäft wenden, in dem Sie die MySleeves erworben haben. Dort wird man Ihnen gerne helfen, wenn nötig. Wenn Sie weitere Bemerkungen zur Herstellung haben, können Sie uns über die Website www.myaddon.be kontaktieren. Wenn Sie andere Rückmeldungen über die MySleeves haben, können Sie uns unter info@myaddon.be erreichen.  My Add On BVBA, Leo de Bethunelaan 44/1 9300 Aalst, Belgien. Version 2020/08